

## KRIOMED sztyft na hemoroidy

Cena: 49,90 PLN



### Opis słownikowy

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Dawka              | -                                  |
| Opakowanie         | 1 szt.                             |
| Postać             | sztyft                             |
| Producent          | ALG PHARMA POLAND SP. Z O.O. SP.K. |
| Rodzaj rejestracji | Wyrób medyczny leczniczy           |
| Substancja czynna  | -                                  |

### Opis produktu

**Właściwości** sztyft chłodzący do samodzielnego stosowania. **Postać:** sztyft chłodzący do samodzielnego stosowania; ma wysoką skuteczność i daje natychmiastową ulgę: usuwa ból, świąd, pieczenie, obrzęk oraz inne dolegliwości hemoroidalne; skutecznie i naturalnie leczy wewnętrzne i zewnętrzne żylaki; odbytu; jest nietoksyczny, nie wywołuje interakcji ani alergii; i kołi podrażnione żyły dzięki specjalnemu systemowi chłodzenia; jest wykonany z wysokogatunkowego tworzywa przy użyciu najnowocześniejszych technologii, nie brudzi bielizny, ani nie powoduje innych zabrudzeń. **Jak działa KRIOMED:** Stosowanie Kriomedu powoduje rekuperację struktur hemoroidów i całkowite ich zalecenie. W trakcie stosowania Kriomedu nie zachodzi potrzeba używania innych środków medycznych, o ile lekarz nie zaleci inaczej. Kriomed przeznaczony jest dla: Wszystkich pacjentów z dolegliwościami hemoroidalnymi (jako samodzielny wyrób medyczny lub produkt uzupełniający – wspomagający terapię podstawową), a w szczególności: kobiet w okresie ciąży i po porodzie; osób, których zawód wymaga wielogodzinnego siedzenia; osób podnoszących duży ciężar; osób mających dietę ubogą w błonnik; osób z nadwagą wywołującą dolegliwości naczyniowe; osób z nadciśnieniem; alergików i diabetyków; sportowców; wegetarian i wegan, ponieważ nie zawiera żadnych substancji odzwierzęcych i nie jest testowany na zwierzętach. **Sposób użycia** Jak prawidłowo stosować Kriomed: Kriomed stosuje się najczęściej 2 razy dziennie przez 6-8 minut wprowadzając do odbytu schłodzony wcześniej sztyft z dowolnym lubrykantem. Kriomed przed użyciem powinien chłodzić się minimum 2 godziny w zamrażalniku domowej lodówki. Po każdym razowym użyciu sztyft należy umyć, zdezynfekować, włożyć do pojemnika i umieścić w zamrażalniku. Jeden sztyft Kriomed wystarczy na pół roku użytkowania. **Ważne** Ostrzeżenia: Wyrób medyczny Kriomed może być stosowany u kobiet w ciąży i kobiet karmiących. Skonsultuj się z lekarzem jeśli jesteś w ciąży lub przed zastosowaniem u dzieci. **Przechowywanie:** Wyrób medyczny Kriomed należy przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu. Użytkowanie tylko zgodnie z instrukcją zawartą w ulotce produktu. **Producent** ALG Pharma Sp. z o. o. Sp. k. ul. Marcina Kasprzaka 3101-234 Warszawa