

## LADY-COMP komputer cyklu NOWA WERSJA

Cena: 1 995,00 PLN



### Opis słownikowy

Producent	B-C sp.j.
Rodzaj rejestracji	Inny produkt

### Opis produktu

**Opis LADY-COMP komputer cyklu NOWA WERSJA** Jeżeli poszukujesz bezpieczeństwa i pewności, że nie zajdziesz w nieplanowaną ciążę, a antykoncepcja hormonalna nie jest optymalna dla Ciebie, znajdziesz to wszystko w Lady-Comp. Najbardziej sprawdzony, nadzwyczaj precyzyjny i super skuteczny komputer cyklu pozwalający na monitorowanie dni płodnych we własnym domu. **Korzyści stosowania Lady-Comp** w pełni kontrolujesz dni płodne, stosujesz antykoncepcję tylko wtedy, kiedy musisz, nie wpływasz na swoją wagę i retencję wody w organizmie, masz pełne libido i super odczuwanie. Lady-Comp jest komputerem cyklu, który stanowi doskonałą alternatywę dla innych form zabezpieczenia przed nieplanowaną ciążą. Dzięki niemu skutecznie i bezbłędnie monitorujesz swoje dni płodne oraz zdiagnozujesz swoją aktualną płodność. Współczynnik Pearl'a wynoszący 0,5, co odpowiada skuteczności antykoncepcyjnej rzędu 99,5%, gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa.\* - Dokładność wskazywania dni płodnych została potwierdzona w dwóch badaniach opublikowanych w Ginekologia Polska. Dodatkowo urządzenie uzyskało pozytywne stanowisko zespołu ośmiu profesorów ginekologii członków Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. **Charakterystyka** Za pomocą codziennych pomiarów temperatury pod językiem, komputer precyzyjnie określa występowanie dni płodnych i niepłodnych oraz dnia występowania owulacji. Pomiar trwa około 40 sekund. Wyniki są wiarygodne już od pierwszego pomiaru. Prognoza płodności na następne 6 dni. Najważniejsza funkcja urządzenia - prognozowanie momentu wystąpienia owulacji z 6 dniowym wyprzedzeniem. To dzięki temu unikniesz zapłodnienia na skutek zagubienia się choćby jednego plemnika. Zawsze możesz to sprawdzić. Dokładność sensora – 0,01 °C. Dokładność i stałość pomiarów decydują o prawidłowości głównego parametru jakim jest temperatura. Wydruk danych na swoim komputerze. W każdej chwili możesz połączyć się ze swoim komputerem i dokonać wykresu danych. Rozszerzony kalendarz płodności. Całą historię swojej płodności wraz z dniem owulacji masz zawsze dostępną. Do tego własne notatki i uwagi, które pomogą Ci zrozumieć zmiany w Twoim organizmie. Pogłębiona STATYSTYKA CYKLU: ilości wszystkich zapamiętanych przez urządzenie cykli, średnia długość cyklu, średni wzrost temperatury po owulacji, zakres owulacji (jak regularnie występuje jajeczkowanie), długość fazy lutealnej, odsetek cykli bezowulacyjnych. Pamięć wszystkich wykonanych pomiarów. Lady-Comp zapisuje i analizuje wszystkie Twoje pomiary, jednak do diagnozy bierze pod uwagę ostatnich 12 miesięcy. 6 godzinny Limit na wykonanie pomiaru. Masz do dyspozycji +/- 3 godziny w stosunku do pomiaru z doby poprzedniej na wykonanie pomiaru następnego dnia. Budzik przypominający o pomiarze. Regularność pomiarów to gwarancja skuteczności. Lady-Comp obudzi Cię o ustalonej porze w czasie na zrobienie pomiaru - możesz go zrobić niemal przez sen. **Sposób użycia** W jaki sposób działa Lady-Comp? W oparciu o fizjologiczny wskaźnik Twojej płodności jakim jest temperatura bazowa organizmu. Komputer cyklu diagnozuje fazy płodności i owulację na podstawie analizy codziennych

pomiarów. Szybko, zdrowo, a przede wszystkim skutecznie! sensor do pomiaru temperatury w ustach Pomiar temperatury Odczytu dokonujesz pod językiem, codziennie rano zaraz po przebudzeniu i przespaniu min. 3-4 godzin. Temperaturę mierzysz ultra czułym sensorem. Lady-Comp daje Ci 6. godzinny limit czasowy na pomiar. Zapis w Lady-Comp Komputer cyklu zapisuje codzienne pomiary. Następnie, za pomocą specjalnych algorytmów matematycznych, analizuje dostępne dane posiadając się bazą danych ponad 1 miliona cykli. Wynik płodności Stan płodności na dany dzień otrzymujesz natychmiast po wykonanym pomiarze. Wynik wskazywany na wyświetlaczu za pomocą kolorów: zielony - dni niepłodne, czerwony - dni płodne. **Skład** Zawartość zestawu komputer cyklu Lady-Comp dwie startowe baterie AAA przewód USB karta gwarancyjna wraz z fakturą skrócona instrukcja obsługi (pełna wersja dostępna online) pudełko