

LAMAMI Termofor z pestkami wiśni

Cena: 13,99 PLN



Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	MEDI PARTNERS SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Opis Termofor przeznaczony jest do schładzania, lub rozgrzewania miejsc dolegliwości. Stosując go nie ma ryzyka poparzeń, odmrożeń, zatruc substancją wypełniającą termofor, ani też wystąpienia alergicznych zmian skórnych. Jest to całkowicie bezpieczny sposób łagodzenia bólu dla całej rodziny. Materiały użyte do produkcji termoforu są najwyższej jakości. 100% bawełna wypełniona idealnie wysuszonymi, pochodzącymi z polskich ekologicznych upraw, pestkami wiśni. Wskazania Zastosowanie na ciepło: bóle brzucha, kolkizatwardzenia, skurcze mięśni masaż uspokajający Zastosowanie na zimno: stłuczenia, otarcia, uderzenia, opuchlizny bóle uszu, gorączka, bóle głowy, ukąszenia insektów lekkie poparzenia **Sposób użycia** Podgrzanie termoforu: w mikrofalach o mocy 300-600 W, przez max. 1 min w piekarniku rozgrzanym do 120 C, przez około 4 minna grzejniku, aż termofor będzie wystarczająco ciepły i pogrzanym Schłodzenie termoforu: w zamrażarce, lub lodówce w czystym i suchym woreczku foliowym, przez około 30 – 60 min **Skład** 100% bawełna, wysuszone pestki wiśni