

LH VITAM TEST OWULACYJNY 5 sztuk DIAGNOSIS

Cena: 13,85 PLN



Opis słownikowy

Producent	DIAGNOSIS
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Opis

LH VITAM test owulacyjny

Wskazania

Test owulacyjny LH Vitam® jest szybkim i prostym w zastosowaniu testem owulacyjnym do domowego użycia. Pozwala on określić dni płodne kobiety z dokładnością 98%. Zestaw pięciu testów umożliwia dokonanie kilku prób testowych, w celu wskazania najbardziej prawdopodobnego dnia do poczęcia dziecka.

Działanie

Wyniki testu pojawią się w ciągu 5 minut.

Wyrób do samodzielnego zastosowania.

Test do diagnostyki in vitro (wyłącznie do użytku zewnętrznego).

Sposób użycia

Przed przeprowadzeniem testu:

Uważnie przeczytaj całą instrukcję użycia. Jeżeli masz jakieś pytania, co do sposobu przeprowadzenia testu lub co do jego rezultatów, zadzwoń na Bezpłatną infolinię 0 800 70 30 11 w godz. 8.00-16.00 (pn-pt)

Foliową torebkę zawierającą test otwórz tuż przed przeprowadzeniem badania.

Wykonaj test pomiędzy godz. 10-20

Nie używaj testu po przekroczeniu daty ważności wydrukowanej na opakowaniu i etykiecie.

Test przechowuj w szczelnym opakowaniu w temperaturze: 4-30° C. Nie zamrażaj.

Przechowuj test z dala od dzieci. Chroń przed światłem słonecznym.

Nie używać więcej niż jeden raz.

Po wykonaniu testu nie należy podejmować żadnych działań o charakterze medycznym bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

Niezbędne elementy dodatkowe: czysty, suchy, plastikowy lub szklany pojemnik na mocz, zegarek

Ważne

Kiedy rozpocząć badanie? Na początku określ długość Twojego cyklu miesięczkowego - licząc od pierwszego dnia krwawienia, aż do dnia poprzedzającego kolejną miesiączkę. Ustal średnią długość cyklu na podstawie obserwacji przeprowadzonych w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Następnie przyjmując pierwszy dzień krwawienia jako dzień 1 (zaznacz go w kalendarzu), użyj Tabeli 1 aby określić kiedy powinnaś rozpocząć przeprowadzanie testu. Przykład: Jeśli Twój cykl wynosi przeciętnie 26 dni, zacznij badanie 10-tego dnia licząc od dnia rozpoczęcia krwawienia miesięczkowego.

- Wyrób medyczny przeznaczony do samokontroli - posiada oznakowanie CE.
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim.

Skład

Zestaw Test owulacyjny LH Vitam® zawiera:

5 testów owulacyjnych,

instrukcję użycia,

pochłaniacz wilgoci (UWAGA: wewnątrz torebki foliowej znajduje się saszetka pochłaniająca wilgoć, którą należy wyrzucić)

