

LORTAN Aspirator do noska



Cena: 17,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	NTRADE SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Artykuł dziecięcy
Substancja czynna	-

Opis produktu

OpisLORTAN Aspirator do noska Aspirator do noska marki Lortan przeznaczony jest do oczyszczania nosa dziecka z wydzieliny, w celu ułatwienia oddychania. Dzięki jednorazowym filtrom zminimalizowane jest ryzyko przenoszenia bakterii. Produkt można stosować u dzieci już od pierwszego dnia życia, a jego używanie jest nieskomplikowane, bezpieczne i skuteczne. Czyszczenie aspiratora jest proste, a dodatkowo można go myć w zmywarce, co zapewnia higienę. **Sposób użycia**Dziecko ułożyć w wygodnej i bezpiecznej pozycji. Końcówkę donosową zaopatrzoną w jednorazowy filtr przyłożyć do otworu nosowego dziecka, a ustnik umieścić w swoich ustach. Delikatnie wciągać powietrze przez ustnik. Czynność powtórzyć z drugim otworem nosowym. Wyjąć zanieczyszczoną końcówkę z filtrem, który należy wyrzucić do kosza (jest jednorazowy). W przypadku gdy błona śluzowa dziecka jest wysuszona lub widoczna jest duża ilość gęstej wydzieliny, przed rozpoczęciem oczyszczania noska należy ostrożnie zaaplikować do każdego otworu nosowego 3-4 krople soli fizjologicznej lub donosowego roztworu wody morskiej. Po użyciu aspirator wyparzyć w wodzie o temperaturze ok. 90 stopni Celsjusza przez maksymalnie 15 sekund lub umyć w górnej części zmywarki.