

LUNETTE kubeczek menstruacyjny PRZEZROCZYSTY model 2 + woreczek



Cena: 100,99 PLN

Opis słownikowy

| | |
|--------------------|-----------------|
| Producent | Eko-dystrybutor |
| Rodzaj rejestracji | Inny produkt |

Opis produktu

WskazaniaLUNETTE kubeczek menstruacyjny PRZEZROCZYSTY model 2 + woreczekKubeczki menstruacyjne Lunette są doskonałą alternatywą dla tamponów. W swoim kraju pochodzenia, Finlandii, miseczka menstruacyjna Lunette została wyróżniona odpowiednikiem polskiego Znak Jakości Q - Avainlippu-merkin. Oznacza to, że jest to produkt najwyższej światowej jakości i certyfikowany.**Działanie**Kubeczek menstruacyjny Lunette, model 2, przezroczysty

Kubeczki menstruacyjne Lunette są doskonałą alternatywą dla tamponów. **W swoim kraju pochodzenia, Finlandii, miseczka menstruacyjna Lunette została wyróżniona odpowiednikiem polskiego Znak Jakości Q - Avainlippu-merkin. Oznacza to, że jest to produkt najwyższej światowej jakości i certyfikowany.** W czym kubeczki Lunette są lepsze od tamponów?

Zalety kubeczka menstruacyjnego Lunette stworzony z **silikonu medycznego** - materiału całkowicie bezpiecznego dla zdrowia, **wyprodukowany w Finlandii** - w ściśle kontrolowanych, nowoczesnych warunkach, zgodnych z regulacjami Unii Europejskiej, **bezpieczny, bezzapachowy, bez domieszek lateksu, ekonomiczny i ekologiczny** - wystarcza na wiele lat, przez co redukuje ilość produkowanych odpadów oraz dba o stan budżetu domowego, **higieniczny, praktyczny, łatwy i wygodny w użyciu, nie wysusza i nie podrażnia** - możesz go nosić nawet przed terminem miesiączki, jeśli obawiasz się, że może Cię ona zaskoczyć, **nie pochłania wilgoci ani drobnoustrojów chorobotwórczych, doskonały przy uprawianiu sportu, dla wszystkich** - bez względu na wiek.

Wyniki ankiety przeprowadzonej przez producenta nie pozostawiają złudzeń:

88% użytkowniczek kubeczków Lunette czuje się bardziej komfortowo w czasie okresu, a 97% poleciłoby Lunette koleżankom **Sposób użycia**Sposób użycia

Czystość

Najpierw zadбай o czystość kubeczka menstruacyjnego (instrukcja poniżej) oraz dłoni. Ręce najlepiej umyć wodą z kranu oraz neutralnym, bezzapachowym mydłem.

Jeżeli dopiero przyzwyczajasz się do używania kubeczka menstruacyjnego, możesz go zmoczyć przed aplikacją wodą lub użyć lubrykantu na bazie wody.

Zwijanie kubeczka

Przed włożeniem kubeczka do pochwy, zwiń go w wybrany przez siebie sposób. Producent proponuje trzy sposoby zwijania kubeczka: w literkę C, w muszlę, w trójkąt. Wszystkie

zostały opisane poniżej.
Umieszczanie kubeczka w ciele

Wybierz wygodną dla siebie pozycję i zrelaksuj się. Kubeczek menstruacyjny można umieszczać w ciele siedząc, leżąc, stojąc lub kucając. Rozłożenie nóg ułatwia jego włożenie. Umieszczony prawidłowo, jest niewyczuwalny. Jego prawidłowe ułożenie możesz sprawdzić próbując nim lekko poruszać - jeśli się całkowicie rozłożył i "zassał", z pewnością jest na swoim miejscu i nie przecieknie.

Nie zaleca się noszenia kubeczka menstruacyjnego w ciele przez czas dłuższy niż 12h. Im obfitsza miesiączka, tym częściej trzeba go opróżniać.

Wyciąganie kubeczka

Umyj dłonie. Wybierz najwygodniejszą dla siebie pozycję i zrelaksuj się. Naciśnij brzeg kubeczka w taki sposób, aby odkleił się od ścianki pochwy, po czym delikatnie i stopniowo wyciągaj go z ciała bujając nim na prawo i lewo oraz ciągnąc go w dół. Zawartość wylej do toalety.

Nie poleca się wyciągania kubeczka trzymając go jedynie za łodyżkę. Powoduje to niestabilność uchwytu, co może skutkować przypadkowym rozlaniem zawartości. Przygotowanie do kolejnego użycia

Wypłucz kubeczek w zimnej wodzie, aby nie pozostawić na nim zabrudzeń lub zapachu. Następnie oczyść go letnią wodą i neutralnym, bezzapachowym mydłem. Jeżeli jest to niemożliwe, możesz wyczyścić kubeczek chusteczką higieniczną lub papierem toaletowym i umyć go przy następnej okazji.

Sposoby zwijania miseczki menstruacyjnej Lunette

| | W literkę C | W muszelkę | W trójkąt | |
|--|--|--|---|---|
| | Najpopularniejszy i najprostszy sposób. Popchnij palcem brzeg kubeczka ku środkowi i wiń go. | Wielkość kubeczka jest mniejsza niż w przypadku pozostałych sposobów zwijania, ale kubeczek trudniej się otwiera. Zgnieć brzeg kubeczka w dół. | Polecany przy trudnościach z aplikacją kubeczka. Zamknij wlot kubeczka, a następnie zegnij jeden z rogów. | |
| | Czyszczenie i higiena kubeczka menstruacyjnego Lunette | | | Czy szc zen ia k ube czk a p owi nno się dok ony wa ć pr zed i po każ dej me nstr uac |

ji or
az
po
każ
dy
m
wyj
ęci
u.

Prz
ed i
po
me
nstr
uac
ji ku
bec
zek
nal
eży
wy
got
ow
ać,
ma
ksy
mal
nie
prz
ez
20
min
ut.
Nal
eży
uw
aża
ć,
aby
nie
dot
ykał
on
spo
du
gar
nka,
gdy
ż m
oże
to s
po
wo
do
wa
ć u
szk
odz

eni
e m
isec
zki
me
nstr
uac
yjn
ej. J
eśli
otw
ory
kub
ecz
ka
są z
abr
udz
one
, trz
eba
je o
czy
ścić
np.
spe
cjal
nie
stw
orz
oną
do t
ego
cel
u s
zcz
ote
czk
ą.
Po
ocz
ysz
cze
niu
po
me
nstr
uac
ji n
ajle
piej
prz
ech
ow
ywa
ć L
une
tte
w b

aw
ełni
any
m
lub
sat
yno
wy
m,
prz
ewi
ew
ny
m
wor
ecz
ku.

Środki ostrożności

Nie zaleca się stosowania kubeczka w czasie krwawień po porodzie, gdyż w tym wyjątkowym dla ciała czasie może zwiększać ryzyko podrażnień i infekcji.

Skład Wymiary kubeczków menstruacyjnych Lunette **Model 1 - zalecany przy skąpych i umiarkowanych krwawieniach, kobietom młodym, bez doświadczeń seksualnych** **Model 2 - zalecany przy normalnych i obfitych krwawieniach, kobietom aktywnym seksualnie**

wszystkie kubeczki menstruacyjne Lunette wykonano z miękkiego silikonu medycznego, ale silikon w Modelu 1 jest bardziej miękki niż ten w Modelu 2 średnica: 41 mm długość kieliszka: 47 mm pojemność: 25 ml długość łyżki: 25 mm

wszystkie kubeczki menstruacyjne Lunette wykonano z miękkiego silikonu medycznego, ale silikon w Modelu 2 jest twardszy niż ten w Modelu 1 średnica: 46 mm długość kieliszka: 52 mm pojemność: 30 ml długość łyżki: 20 mm

Wymiary kubeczków menstruacyjnych Lunette **Model 1 - zalecany przy skąpych i umiarkowanych krwawieniach, kobietom młodym, bez doświadczeń seksualnych** wszystkie kubeczki menstruacyjne Lunette wykonano z miękkiego silikonu medycznego, ale silikon w Modelu 1 jest bardziej miękki niż ten w Modelu 2 średnica: 41 mm długość kieliszka: 47 mm pojemność: 25 ml długość łyżki: 25 mm **Model 2 - zalecany przy normalnych i obfitych krwawieniach, kobietom aktywnym seksualnie** wszystkie kubeczki menstruacyjne Lunette wykonano z miękkiego silikonu medycznego, ale silikon w Modelu 2 jest twardszy niż ten w Modelu 1 średnica: 46 mm długość kieliszka: 52 mm pojemność: 30 ml długość łyżki: 20 mm