

MILAPHARM Test ciążowy Bejbi - który tydzień? - Strumieniowy, 1 szt.



Cena: 10,69 PLN

Opis słownikowy

| | |
|--------------------|----------------------|
| Opakowanie | 1 szt. |
| Producent | MILAPHARM SP. Z O.O. |
| Rodzaj rejestracji | Wyrób medyczny |

Opis produktu

Opis Test BEJBI KTÓRY TYDZIEŃ? ciążowy strumieniowy

Test strumieniowy do oznaczania hormonu hCG w moczu, czułość 25 mIU/ml. Test do samodzielnego wykonania w warunkach domowych.

Nie wymaga zbierania moczu, można go stosować o każdej porze dnia, łatwy do wykonania, podaje wynik już w ciągu 5 minut. Czułość analityczna – 25 mIU/ml.

DO CZEGO SŁUŻY BADANIE HORMONU HCG?

Test ciążowy „Bejbi Ultraczuły” strumieniowy służy do szybkiego, jakościowego oznaczenia hormonu HCG w próbce moczu, w celu wczesnego wykrywania ciąży.

CZYM JEST HORMON HCG?

Ludzka gonadotropina kosmówkowa (HCG), to hormon glikoproteinowy wydzielany przez rozwijające się łożysko wkrótce po zapłodnieniu. Stężenie HCG stale rośnie w gwałtownym tempie, często przekraczając 100 mIU/ml w okresie przypadającym na pierwszą brakującą miesiączkę. Wystąpienie HCG wkrótce po zapłodnieniu i późniejszy wzrost stężenia w początkowym okresie ciąży powoduje, że jest to doskonały wskaźnik do wczesnego wykrywania ciąży.

KTO KORZYSTA Z TESTU CIĄŻOWEGO?

Test ciążowy „Bejbi Który Tydzień” strumieniowy jest odpowiedni dla wszystkich kobiet, które chcą w prosty, szybki i bezpieczny sposób zweryfikować ciążę.

JAK DZIAŁA TEST CIĄŻOWY?

Test ciążyowy „Bejbi Który Tydzień?” strumieniowy to urządzenie immunochromatograficzne, które wykrywa hormon hCG w moczu poprzez specjalne sprzężone ze złotem przeciwciała monoklonalne zawarte w reaktywnym pasku.

1-2 Tydzień ciąży – kolorowa linia pojawia się na linii kontrolnej C i linii testowej T1, gdy $25 \text{ mIU/mL} \leq \text{stężenie HCG} < 100 \text{ mIU/mL}$.
2-3 Tydzień ciąży – kolorowa linia pojawia się na linii kontrolnej C i liniach testowych T1 i T2, gdy $100 \text{ mIU/mL} \leq \text{stężenie HCG} < 300 \text{ mIU/mL}$.
3-4 Tydzień ciąży – kolorowa linia pojawia się na linii kontrolnej C i linii testowej T1, T2 i T3, gdy $300 \text{ mIU/mL} \leq \text{stężenie HCG} < 1000 \text{ mIU/mL}$.
≥ 4 Tydzień ciąży – kolorowa linia pojawia się na linii kontrolnej C i linii testowej T1, T2, T3 i T4, gdy $\text{stężenie HCG} \geq 1000 \text{ mIU/mL}$.

KIEDY NALEŻY WYKONAĆ TEST CIĄŻOWY?

Test można przeprowadzić po 7 dniach od momentu zapłodnienia, chociaż wskazane jest wykonanie go dopiero dzień po terminie spodziewanej miesiączki, o dowolnej porze dnia. Zaleca się użycie pierwszego moczu rano (eliminując pierwszy strumień), jako bardziej skoncentrowanego.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kopertka foliowa zawierająca 1 test i 1 środek pochłaniający wilgoć Instrukcja użytkownika wyrobu

Podmiot odpowiedzialny:

MILAPHARM SP. Z O.O.