

MOONCUP kubeczek menstruacyjny rozmiar A



Cena: 109,00 PLN

Opis słownikowy

Producent	MOONCUP
Rodzaj rejestracji	Inny produkt

Opis produktu

WskazaniaMOONCUP kubeczek menstruacyjny rozmiar A Kubeczek menstruacyjny Mooncup w rozmiarze A jest odpowiedni dla kobiet po 30 roku życia a także dla Pań, które rodziły siłami natury. Rozmiar: 46 mm średnicy i 50 mm długości + 21mm nóżka, którą można przyciąć.
DziałanieDlaczego warto wybrać kubeczek menstruacyjny Mooncup? Mooncup jest bezpieczniejszy niż zwykłe tampony, dlatego że nie zawiera dioksyn, chemikaliów, farb, pestycydów ani plastiku. Nie zawiera także szkodliwych dla zdrowia kobiety wybielaczy. Mooncup jest produktem wegańskim. Ponadto kubeczek menstruacyjny Mooncup w przeciwieństwie do tamponów nie zostawia na ściankach pochwy włókien. Kubeczek menstruacyjny jest łatwy w użyciu. Kubeczek menstruacyjny jest szczelny, dzięki temu możesz chodzić z nim na basen. Zakup zwróci się Ci już po roku używania. Kubeczka możesz używać przez 5 lat.
Sposób użycia Mooncup ma większą pojemność niż tampony. Dzięki temu możesz opróżniać go rzadziej, co 4-8 godzin. Kiedy opróżnisz kubeczek, opłucz go wodą. Jeśli korzystasz z publicznej toalety, możesz użyć buteleczki z wodą lub przetrzeć kubeczek menstruacyjny papierem lub chusteczką. Aby zdezynfekować Mooncup gotuj go przez 5-7 minut. Możesz także użyć tabletek do dezynfekcji lub żelu do dezynfekcji. Jak zakłada się kubeczek menstruacyjny? Bardzo ważne jest, aby przed założeniem kubeczka menstruacyjnego rozluźnić mięśnie. Jeśli mięśnie są napięte, poprawne umieszczenie miseczki menstruacyjnej staje się trudne. Zanim włożysz Mooncup do pochwy, zegnij go w jeden z poniższych sposobów:

Kubeczek menstruacyjny zakłada się niżej niż tampon. Z pewnością na początku będziesz musiała poćwiczyć prawidłowe zakładanie kubeczka, ale kiedy już dojdiesz do wprawy umieszczania Mooncup w pochwie, nie będziesz go w ogóle wyczuwała. Zapomnisz, że masz okres.

Jak wyjmuję się kubeczek menstruacyjny? Wyjmowanie kubeczka menstruacyjnego jest bardzo proste. Ważne jest rozluźnienie mięśni, które utrzymują kubeczek w pochwie. Przed wyjęciem kubeczka menstruacyjnego koniecznie umyj ręce. Przyjmij wygodną pozycję - możesz np. kucnąć lub siedząc na toalecie rozchylić nogi. Kiedy znajdziesz już wygodną pozycję, naciśnij delikatnie palcem wskazującym i kciukiem bazę kubeczka. Dzięki temu kubeczek odklei się od ścianki pochwy. Wyjmuj kubeczek "bujając" nim naprzemiennie w prawo i w lewo.
Skład Z czego zrobiony jest kubeczek menstruacyjny Mooncup? Mooncup wykonano z hipoalergicznego silikonu medycznego, dlatego właśnie jest bezpieczny w użyciu nawet dla bardzo wrażliwych kobiet, które są skłonne do alergii.