

NEXCARE COLDHOT CLASSIC okład żelowy 26 cm x 11 cm



Cena: 28,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	3M POLAND SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Opis Stosować w przypadku: bólów reumatycznych, bólów mięśniowych, bólów chronicznych (np. lumbago), bolesnych skurczy mięśni. Jako okład zimny w przypadku: urazów (stłuczenia, skręcenia itp.), bólów głowy, zębów, obrzęków. Właściwości: zimny-ciepły okład wielokrotnego użytku o bardzo szerokim zastosowaniu. Produkt polecany jest dla dzieci (urazy, obrzęki), kobiet (w tym również kobiet w ciąży, matek karmiących), osób starszych (bole reumatyczne) i narażonych na kontuzje (stłuczenia). Idealny dla dzieci i dorosłych. Środek przeciwbólowy i przeciwobrzękowy. Działa kojąco w przypadku bólów głowy, zębów, krzyża, bólów reumatycznych. Zawsze miękki i plastyczny. Układający się do kształtu ciała. Ekonomiczny - można go używać wielokrotnie (termin ważności 5 lat). Bezpieczny w użyciu, łatwy w stosowaniu. Można go myć wodą z mydłem. Wypełniony niebieskim, nietoksycznym żelem - gwarantuje pełne bezpieczeństwo stosowania. Żel umieszczony w trwałej i odpornej na uszkodzenia folii. Jako okład ciepły w przypadku: bólów reumatycznych, bólów mięśniowych, bólów chronicznych (np. lumbago), bolesnych skurczy mięśni. **Skład** 1. Jako okład ciepły w przypadku: bólów reumatycznych, bólów mięśniowych, bólów chronicznych (np. lumbago), bolesnych skurczy mięśni. Włożyć na kilka minut do gorącej wody (temp. około 80 st C) lub do mikrofalówki (zgodnie z oznaczeniem na opakowaniu). Przed przyłożeniem do skóry należy włożyć do osłonki lub owinąć ściereczką. Jednorazowo należy przykładać nie dłużej niż 20 min., przed powtórzną aplikacją zalecana jest co najmniej 20 min. przerwa. 2. Jako okład zimny w przypadku: urazów (stłuczenia, skręcenia itp.), bólów głowy, zębów, obrzęków. Włożyć do zamrażalnika na 2 godz.; przed przyłożeniem do skóry należy włożyć do osłonki lub owinąć ściereczką. Jednorazowo należy przykładać nie dłużej niż 20 min., przed powtórzną aplikacją zalecana jest co najmniej 20 min. przerwa. Zalecane jest przechowywanie okładu w zamrażalniku, co umożliwi natychmiastowe użycie okładu zimnego w przypadku urazu.