

NEXCARE COLDHOT Cold Spray 150 ml



Cena: 11,50 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	150 ml
Postać	-
Producent	3M POLAND SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	-

Opis produktu

OpisNEXCARE COLDHOT Cold Spray 150 mlIce Spray, dzięki szybkiemu chłodzeniu wybranych partii ciała, pomaga łagodzić ból powstały w wyniku urazów, np. naciągnięcia mięśni, skręceń, zwichnięć, stłuczeń. Opóźnia powstanie opuchlizny i zasinień.Efekt szybkiego schłodzenia jest osiągnięty dzięki rozprężaniu gazu nośnego, będącego pod ciśnieniem. Mentol dodatkowo daje uczucie chłodu na skórze, co wzmacnia łagodzący efekt zimna.**Sposób użycia**Należy rozpylać na poszkodowaną część ciała z odległości 25 cm, przez nie dłużej niż 5 sekund.Nie przyskać na otarcia, rany i śluzówkę.Jeżeli produkt będzie stosowany przez dłuższy czas i rozpylany z mniejszej odległości, może dojść do uszkodzeń skóry.Stosować natychmiast po wypadku.Nie przedłużać stosowania. Nie przyskać na oczy.W przypadku poważnych obrażeń związanych ze stosowaniem produktu medycznego, jakim jest spray chłodzący, należy natychmiast poinformować o nich producenta, który zgłosi to właściwym organom.**Skład**Butan, Propan, Izobutan, Alkohol Izopropylowy, Mirystynian Izopropylu, Perfumy, Mento