

## NOVAMA WHITE K Aspirator elektroniczny do nosa



Cena: 79,69 PLN

### Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	NOVAMED SP.Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Artykuł dziecięcy
Substancja czynna	-

### Opis produktu

**Opis**NOVAMA WHITE K Aspirator elektroniczny do nosa2 stopnie mocy które kryją się pod dwoma przyciskami. Oczyszczanie nosa jest łatwe i szybkie. Odessana wydzielina może nie od razu pojawić się we wnętrzu zbiorniczka. Po każdym użyciu zaleca się szybkie oczyszczenie końcówki, wraz z głowicą i zbiorniczkiem po ich uprzednim demontażu z urządzenia. Dla bardziej efektywnego odsysania, zatkać drugie nozdrze dziecka. Niewielka ilość soli fizjologicznej lub wody morskiej w aerozolu może pomóc rozrzedzić wydzielinę. Po aplikacji należy odczekać chwilę, a następnie przystąpić do odsysania wydzieliny. Aby zmniejszyć dyskomfort spowodowany podciśnieniem, należy otworzyć usta dziecka. Zużyte lub częściowo zużyte baterie mogą mieć wpływ na efektywność pracy urządzenia i co za tym idzie oczyszczania. Obniżona głośność i maksymalna dostępna moc Novama White K Urządzenie pracuje znacznie ciszej od standardowego aspiratora. Umieść końcówkę aspiratora w nozdrzu, a następnie usuwaj wydzielinę w sposób ciągły lub etapami (z przerwami). Urządzenie jest kompaktowe, wygodne do trzymania i łatwe w obsłudze. Jest ono również bezpieczne i łatwe do stosowania u dzieci. Specjalna konstrukcja głowicy jest łatwa do czyszczenia. Nadaje się do stosowania także, gdy dziecko śpi. Urządzenie do pracy potrzebuje tylko dwóch baterii alkalicznych 1,5 V typu AA; baterie można łatwo wymienić w każdej chwili i dowolnym miejscu. Elementy Novama White K można wyparzać w wrzątku. Końcówki, zbiorniczek na wydzielinę oraz głowicę urządzenia można demontować i myć pod bieżącą wodą (części te można dodatkowo dezynfekować wrzącą wodą). Dwie końcówki Novama White K na katar i katar. Dzięki zastosowaniu miękkich, specjalnie wyprofilowanych końcówek odsysanie wydzieliny jest bezpieczne i bezbolesne. Dobierz odpowiednią końcówkę do kształtu i rozmiaru nozdrzy dziecka i rodzaju wydzieliny: Duża końcówka- zalecana starszym dzieciom i gdy wydzielina jest gęsta. Mała końcówka- zalecana młodszym dzieciom i w przypadku, gdy wydzielina jest rozwodniona i ciekła. DANE TECHNICZNE

SKU

Kod EAN

BLOZ 7

Kod Dostawcy

---

Kolor

---

Rodzaj aspiratora

---

Marka

---

Gwarancja

---

Zasilanie

---

Waga urządzenia

---

Wymiary

---

Dodatkowe informacje

---

Skład zestawu

---