


OCTENISEPT Żel 20 ml

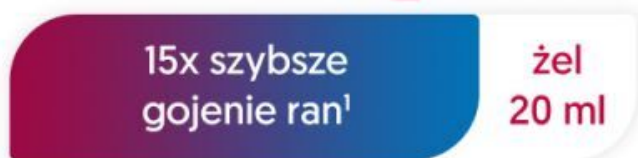

1. Na podstawie badania klinicznego: Efficacy and cost-effectiveness of octenidine wound gel in the treatment of chronic venous leg ulcers in comparison to modern wound dressings Hämmelie G, Strohler R.

Cena: 23,45 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	20 ml
Postać	żel
Producent	SCHULKE POLSKA SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Właściwości OCTENISEPT Żel 20 ml Octenisept® żel to wyrób medyczny do stosowania na ostre zranienia skóry, takie jak otarcia, rany cięte i lekkie oparzenia, np. oparzenie słoneczne. Stwarza wilgotne warunki niezbędne do prawidłowego gojenia się rany. Ponadto chroni ranę przed infekcją. Dzięki swojej wyjątkowej formule Octenisept® żel tworzy barierę ochronną przed bakteriami, dzięki czemu chroni przed infekcjami i stanami zapalnymi. Wspiera i przyspiesza naturalne gojenie ran. Ponadto żel ogranicza powstawanie blizn podczas gojenia rany. Dzięki efektowi chłodzącemu Octenisept® żel łagodzi ostry świąd. Octenisept® żel jest bezbarwny i nie powoduje pieczenia podczas nakładania. **Sposób użycia** Sposób użycia wyrobu medycznego 1. Zdezynfekuj ranę. 2. Nanieś cienką warstwę żelu. 3. W razie konieczności całość zabezpiecz za pomocą plastra lub bandaża. Stosowanie produktu Żel należy aplikować 1-2 razy dziennie, aż do całkowitego zagojenia. Produkt wyłącznie do użytku zewnętrznego. **Ważne** Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników. Bez kontroli lekarza nie należy stosować wyrobu dłużej niż 2 tygodnie. Produkt niejadalny - nie stosować na rany przewlekłe. Nie stosować na chrząstkę szklaną, w uszach ani w nosie. Nie stosować do infuzji ani wstrzyknięć. Unikać kontaktu z oczami. Nie spożywać. **Składniki** Aqua purificata, Propylene Glycol, Hydroxyethylcellulose, Octenidine HCl. **Producent** Schulke Polska Sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 13202-305 Warszawa

Galeria



octenisept® żel
 Działa jak opatrunek w żelu
 - nawilża i tworzy barierę ochronną

Przyspiesza gojenie ran do 15x*

- Zabezpiecza rany przed infekcją
- Zmniejsza świąd i odczuwanie bólu
- Zapobiega powstawaniu blizn

Stosowany pod opatrunek zapobiega jego przywieraniu

* Wynik badania klinicznego (Björck et al., 2004) i oceny skuteczności octenisept żel w oparunku w leczeniu otwartych ran. Wynik badania klinicznego w oparunku w leczeniu otwartych ran. Wynik badania klinicznego w oparunku w leczeniu otwartych ran.

octenisept® żel
 zastosowanie

- Rany, skaleczenia, otarcia
- Szwy pooperacyjne
- Oparzenia
- Wspomagająco w ranach trudno gojących się (owrzodzenia, odleżyny)
- Po zabiegach medycyny estetycznej

octenisept® żel
 sposób użycia

1-2 DZIENNIE

- Bezpośrednio na oczyszczoną ranę nałożyć 3-5 mm warstwy żelu.
- Żel zastosowany pod opatrunek może pozostać na powierzchni rany do kolejnej zmiany opatrunku.
- Żel zastosowany samodzielnie działa jak opatrunek w żelu.

octenisept® żel nakładać 1-2 razy dziennie, aż do całkowitego wygojenia.

octenisept® żel
 zawiera m.in.

octenidyna	hydroksyetyloceluloza
Najszybsze działanie wśród substancji przeciwbakteryjowych!	Tworzy warstwę ochronną na ranie jak opatrunek
Bezpieczna dla alergików, dzieci i osób z wrażliwą skórą	Pochłania nadmiar wydzielu z rany i oddaje je do opatrunku
Zabezpiecza przed bakteriami, wirusami i grzyzami	Schładza i zmiękcza mięjące kontakt, nie pozwalając na przywieranie opatrunku do rany

* Wynik badania klinicznego (Björck et al., 2004) i oceny skuteczności octenisept żel w oparunku w leczeniu otwartych ran. Wynik badania klinicznego w oparunku w leczeniu otwartych ran. Wynik badania klinicznego w oparunku w leczeniu otwartych ran.

octenisept®
 ekspert w gojeniu ran

1. Zastosuj 1-2 razy dziennie

15. Działa jak opatrunek

LECZY | GOI | KOCI