

ORGANICUP kubeczek menstruacyjny rozmiar A

Cena: 79,99 PLN



Opis słownikowy

Producent	OrganiCup
Rodzaj rejestracji	Inny produkt

Opis produktu

WskazaniaORGANICUP kubeczek menstruacyjny rozmiar AOrganiCup to WOLNA OD CHEMII alternatywa, która zapewnia do 8 godzin ochrony (w dzień i w nocy).**Działanie**Jedyny Kubeczek Menstruacyjny certyfikowany przez AllergyCertified!! Dlaczego to jest takie ważne?Mamy pewność, iż silikon medyczny, z którego jest wykonany kubeczek jest całkowicie bezpieczny, a także nie jest barwiony szkodliwymi i alergizującymi barwnikami! Pamiętajmy, że kubeczek menstruacyjny jest w naszym ciele do 12 godzin i zapewnia nam bezpieczeństwo i komfort.Musimy być pewne, że to co jest tak blisko z naszym ciałem jest dla nas CAŁKOWICIE BEZPIECZNE!Rozmiar A jest zalecany dla kobiet, które jeszcze nie rodziły, bądź rodziły poprzez cięcie (nie rodziły w sposób naturalny) 9 na 10 kobiet, które spróbowały, używają do dziś*OrganiCup ma na celu zmienić wpływ miesiączki na nasze: życie, ciało i środowisko.Kubki menstruacyjne są alternatywą dla konwencjonalnych produktów menstruacyjnych.Spełniają wszystkie odpowiednie wymogi dla twojego zdrowia, dla wygody i dla środowiska.3 główne powody, dla których warto przejść na OrganiCup:1. Menstruacja wolna od chemii!OrganiCup jest wykonanyjedynie z silikonu medycznego. Nie zawiera: wybielaczy, barwników, środkówwzapachowych. W 100% wolny od substancji chemicznych. Oprócz tego kubeczek zbiera krew zamiast jąwchłaniać, co daje nam pewność braku szkodliwego wpływu na nasze ciało.OrganiCup jest certyfikowanyprzez AllergyCertified™, zarejestrowany w The Vegan Society (bez testów na zwierzętach) i spełniawszystkie odpowiednie przepisy.2. 8 godzin wolnościOrganiCup zapewnia 8 godzin ochrony, dzięki czemu nie musisz myśleć o swojej menstruacji w ciągu dnia lub w nocy.Wystarczy tylko opróżnić swójkubeczek rano i wieczorem (w zależności od tego, jakintensywna jest twoja menstruacja). Oznacza to, że możesz biegać, pływać i spać - bez obaw.3. Oszczędzaj pieniądze i szanuj naszą planetęOrganiCup jest wielokrotnego użytku, co oznacza, że każdego miesiąca ratujesz środowisko od dużej ilości odpadów.Jeśli to nie wystarczający powód, to możemy dodać, że dzięki OrganiCup nie musisz co miesiąckupować produktów menstruacyjnych, co da odczuwalny efekt w postaci grubości Twojego portfela :)**Sposób użycia**Przed pierwszym użyciem OrganiCup należy wysterylizować kubeczek we wrzącej wodzie przez 3-5 minuty.Na początku pamiętaj o umyciu rąk mydłem. Złóż kubeczek. Istnieją różne metody składania - możeszwypróbować równie i wybrać taką, która odpowiada najbardziej. Włóż złożony kubeczek i pozwól murozwinąć się wewnątrz pochwy.Po aplikacji kubeczek się rozłoży przy charakterystycznym dźwięku ssania lub dźwięku 'pop' co oznacza, że został odpowiednio umieszczony. W razie wątpliwości należy poczuć dnokubka - po włożeniu powinno ono być okrągłe lub owalne. Jeśli poczujesz wgniecenia lub zgniecenia nakubeczku, oznacza to, że się nie rozłożył. Delikatnie przytrzymaj podstawę kubka (nie trzpień!) i spróbuj go obrócić, aby zapewnić utworzenie uszczelki ssania. Kiedy będzie na miejscu, postaraj się niecopociągnąć za trzpień, jeśli poczujesz opór, ssanie zostało stworzone i kubeczek został pomyślnie umieszczony!Usuwanie OrganiCupPamiętaj, aby ponownie umyć ręce. Znajdź pozycję, w której zrelaksujesz się.Pociągnij delikatnie za nóżkę/trzpień i użyj mięśni brzucha, aby popchnąć kubeczek w dół,

aż dojdiesz do dna kubka. Delikatnie uszczypnij dno, aby uwolnić zasysanie i uwolnij OrganiCup, przesuwając go na boki. Opróżnij kubek wylewając zawartość do toalety, opłucz kubek wodą (pamiętaj o otworach wentylacyjnych) i zaaplikuj go ponownie. Po zakończeniu okresu przegotuj kubeczek we wrzącej wodzie przez 3-5 minut i włóż do bawełnianej torebki OrganiCup. Jak czyścić OrganiCup w publicznej toalecie? Możesz używać OrganiCup do 12 godzin, więc zazwyczaj będziesz musiała opróżnić go rano i wieczorem, ale jeśli znajdziesz się w sytuacji, w której musisz go opróżnić i nie masz dostępu do wody, możesz użyć OrganiWipe z OrganiCup, zabrać ze sobą butelkę wody lub po prostu użyć papieru toaletowego do czyszczenia. Który rozmiar powinnam wybrać? OrganiCup jest dostępny w dwóch rozmiarach: A i B. A jest zalecany dla kobiet, które jeszcze nie rodziły, bądź rodziły poprzez cięcie (nie rodziły w sposób naturalny), a B jest zalecany dla kobiet, które rodziły w sposób naturalny. **Skład** 100% silikon medyczny. **Wymiary** kubeczka menstruacyjnego OrganiCup: średnica 40 mm, długość: około 5 cm bez łodyżki, pojemność: 25 ml.