

OTOVENT Zestaw do wyrównywania ciśnienia w przewodzie słuchowym

Cena: 54,90 PLN



Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	AXPHARM SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Właściwości Leczenie ujemnego ciśnienia w uchu środkowym dorosłych i dzieci powyżej 3. roku życia. **Właściwości:** Zasada działania polega na tym, że dziecko napełnia balon medyczny powietrzem wdmuchiwanym przez nos. Wyrównuje w ten sposób ciśnienie i łagodzi objawy ze strony uchu środkowego. Dzieci mogą używać zestawu Otovent w domu pod nadzorem rodziców. Leczenie jest bezbolesne, bez efektów ubocznych i zajmuje niewiele czasu. **Sposób użycia** Stosować 2-3 razy dziennie przez okres 2-3 tygodni. Rurkę należy szczelnie przyłożyć do jednego z otworów nosowych, podczas gdy drugi otwór zamykamy szczelnie palcem. Przy zamkniętych ustach nadmuchujemy balon nosem do wielkości grapefruita. Następnie możemy wypuścić powietrze z balonu przez nos, jednocześnie przełykając. **Ważne** Ważne informacje dotyczące wyrobu medycznego: Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE. Posiada deklarację zgodności UE. Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim. Zawiera etykietę w języku polskim. Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta. **Producent** AXPHARM SP. Z O.O.