

## PANI TERESA Opaska elastyczna stawu łokciowego - bezszywowa rozmiar L



Cena: 18,70 PLN

### Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	SIGVARIS S.A.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

### Opis produktu

**Opis** WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE: wczesna rehabilitacja stawów po złamaniach, operacjach i urazach wzmacnianie i ochrona stawów po zdjęciu opatrunków gipsowych wzmacnianie aparatu więzadłowego stawu przy wysiłku fizycznym ROZMIAR L Obwód ręki nad łokciem 30 – 35 cm Instrukcja używania: Dopasowanie rozmiaru: W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu nogi nad łokciem, a następnie wybrać rozmiar z tabeli na opakowaniu. Sposób zakładania: Opaskę naciągnąć na wysokość stawu łokciowego. Przechowywanie: W oryginalnym opakowaniu, w suchym i zacienionym miejscu. Przepis prania: Prać ręcznie w temperaturze 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania wełny. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia! Nie prasować! Nie chlorować! Uwagi: Stosowanie opaski należy skonsultować z lekarzem. W czasie noszenia opaski zalecane jest wykonywanie podstawowego zestawu ćwiczeń rehabilitacyjnych. Ciągłe stosowanie opaski bez wykonywania ćwiczeń może doprowadzić do osłabienia mięśni. Nie jest wskazane stosowanie wyrobu przez całą dobę. Nie stosować bezpośrednio na rany lub uszkodzoną skórę. Nie stosować w przypadku niewłaściwego dobrania rozmiaru. Wyrób zbyt ciasny może pogorszyć krążenie krwi.