

# PANI TERESA Opaska elastyczna stawu łokciowego rozmiar XL



Cena: 12,45 PLN

## Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	SIGVARIS S.A.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

## Opis produktu

**Opis** WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE: w przewlekłych zmianach zwyrodnieniowych – reumatycznych stawu łokciowego, łagodzi ból i obrzęki w zapaleniu kłykci kości ramiennej, a zwłaszcza po blokadach okołostawowych wzmacnia aparat więzadłowy stawu łokciowego po stłuczeniach łokciaw przypadkach wystąpienia krwiaka kaletki łokciowej po wszelkich operacjach stawu łokciowego jako opatrunek po zdjęciu gipsu. ROZMIAR XL: Obwód ręki nad łokciem 36-40 cm. Instrukcja użytkowania: Dopasowanie rozmiaru: W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu ręki nad łokciem, a następnie wybrać rozmiar z tabeli na opakowaniu. Sposób zakładania: Opaskę naciągnąć na wysokość stawu łokciowego. Nie stosować bezpośrednio na rany lub uszkodzoną skórę. Przechowywanie: W oryginalnym opakowaniu, w suchym i zacienionym miejscu. Przepis prania: Prać ręcznie w temperaturze 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania wełny. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia! Nie prasować! Nie chlorować! Uwagi: Stosowanie opaski należy skonsultować z lekarzem. W czasie noszenia opaski zalecane jest wykonywanie podstawowego zestawu ćwiczeń rehabilitacyjnych. Ciągłe stosowanie opaski bez wykonywania ćwiczeń może doprowadzić do osłabienia mięśni. Produkt jest dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Deklaracja Zgodności CE wytwórcy.