

PANI TERESA Opaska elastyczna stawu nadgarstkowego - krótka rozmiar M 2 sztuki



Cena: 15,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	2 szt.
Postać	-
Producent	SIGVARIS S.A.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Opis WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE: wzmacnia aparat więzadłowy nadgarstka łagodzi ból i obrzęk zapobiega nadwężeniom i naciągnięciom stawu nadgarstka
Tabela rozmiarów ROZMIAR M Obwód ręki w nadgarstku 19-22 cm
Instrukcja używania: Dopasowanie rozmiaru: W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu ręki w nadgarstku, a następnie wybrać rozmiar z tabeli na opakowaniu. Sposób zakładania: W opakowaniu znajdują się dwie opaski. Opaski zapiąć na wysokości stawów nadgarstkowych. Nie stosować bezpośrednio na rany lub uszkodzoną skórę. Przechowywanie: W oryginalnym opakowaniu, w suchym i zacienionym miejscu. Przepis prania: Prać ręcznie w temperaturze 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania wełny. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia! Nie prasować! Nie chlorować!
Uwagi: Stosowanie opaski należy skonsultować z lekarzem. W czasie noszenia opaski zalecane jest wykonywanie podstawowego zestawu ćwiczeń rehabilitacyjnych. Ciągłe stosowanie opaski bez wykonywania ćwiczeń może doprowadzić do osłabienia mięśni. Produkt jest dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Deklaracja Zgodności CE wytwórcy. **PODOBNE PRODUKTY:** 14 – 1819 – 2223 – 25
Instrukcja używania: Dopasowanie rozmiaru: W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu ręki w nadgarstku, a następnie wybrać rozmiar z tabeli na opakowaniu. Sposób zakładania: W opakowaniu znajdują się dwie opaski. Opaski zapiąć na wysokości stawów nadgarstkowych. Nie stosować bezpośrednio na rany lub uszkodzoną skórę. Przechowywanie: W oryginalnym opakowaniu, w suchym i zacienionym miejscu. Przepis prania: Prać ręcznie w temperaturze 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania wełny. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia! Nie prasować! Nie chlorować!
Uwagi: Stosowanie opaski należy skonsultować z lekarzem. W czasie noszenia opaski zalecane jest wykonywanie podstawowego zestawu ćwiczeń rehabilitacyjnych. Ciągłe stosowanie opaski bez wykonywania ćwiczeń może doprowadzić do osłabienia mięśni. Produkt jest dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Deklaracja Zgodności CE wytwórcy.