

## PANI TERESA Opaska elastyczna stawu skokowego - skarpetka - bezszwowa rozmiar S



Cena: 19,99 PLN

### Opis słownikowy

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Dawka              | -                   |
| Opakowanie         | 1 szt.              |
| Postać             | -                   |
| Producent          | SIGVARIS S.A.       |
| Rodzaj rejestracji | Wyrób medyczny inny |
| Substancja czynna  | -                   |

### Opis produktu

**Opis** WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE: wczesna rehabilitacja stawów po złamaniach, operacjach i urazach wzmocnienie i ochrona stawów po zdjęciu opatrunków gipsowych wzmocnienie aparatu więzadłowego stawu przy wysiłku fizycznym ROZMIAR S Obwód nogi nad kostką 19-21 cm Instrukcja używania: Dopasowanie rozmiaru: W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu nogi nad kostką, a następnie wybrać rozmiar z tabeli na opakowaniu. Sposób zakładania: Część dzianą wyrobu – skarpetkową – wciągnąć na nogę tak, aby węższy ściągacz przypadła na śródstopie, a szerszy ściągacz powyżej kostki. Następnie odpiąć rzepy na taśmie dociągającej i nałożyć ją na nogę – krzyżując na przegubie (według rysunku), zapiąć na rzep regulując ucisk. Przechowywanie: W oryginalnym opakowaniu, w suchym i zacienionym miejscu. Przepis prania: Prać ręcznie w temperaturze 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania wełny. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia! Nie prasować! Nie chlorować! Uwagi: Stosowanie opaski należy skonsultować z lekarzem. W czasie noszenia opaski zalecane jest wykonywanie podstawowego zestawu ćwiczeń rehabilitacyjnych. Ciągłe stosowanie opaski bez wykonywania ćwiczeń może doprowadzić do osłabienia mięśni. Nie jest wskazane stosowanie wyrobu przez całą dobę. Nie stosować bezpośrednio na rany lub uszkodzoną skórę. Nie stosować w przypadku niewłaściwego dobrania rozmiaru. Wyrób zbyt ciasny może pogorszyć krążenie krwi.