

PANI TERESA Opaska elastyczna stawu skokowego - taśma zapinana na rzep rozmiar S



Cena: 14,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	SIGVARIS S.A.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Opis WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE: wzmacnia aparat więzadłowy stawu skokowego w przypadkach schorzeń reumatycznych - zwyrodnieniowych, zabezpiecza po urazach, chroni przed częstymi skręceniami stawu, łagodzi bóle i obrzęki, jako opatrunek po zdjęciu gipsu. ROZMIAR: S - obwód nogi nad kostką 19-22 cm. Instrukcja użytkowania: Dopasowanie rozmiaru: W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu nogi nad kostką, a następnie wybrać rozmiar z tabeli na opakowaniu. Sposób zakładania: Opaskę nałożyć na staw skokowy krzyżując taśmę na przegubie. Nie stosować bezpośrednio na rany lub uszkodzoną skórę. Przechowywanie: W oryginalnym opakowaniu, w suchym i zacienionym miejscu. Przepis prania: Prać ręcznie w temperaturze 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania wełny. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia! Nie prasować! Nie chlorować! Uwagi: Stosowanie opaski należy skonsultować z lekarzem. W czasie noszenia opaski zalecane jest wykonywanie podstawowego zestawu ćwiczeń rehabilitacyjnych. Ciągłe stosowanie opaski bez wykonywania ćwiczeń może doprowadzić do osłabienia mięśni. Produkt jest dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Deklaracja Zgodności CE wytwórcy.