

## PANI TERESA Pas brzuszny 22 M 1 sztuka



Cena: 48,50 PLN

### Opis słownikowy

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Dawka              | -                   |
| Opakowanie         | 1 szt.              |
| Postać             | -                   |
| Producent          | SIGVARIS S.A.       |
| Rodzaj rejestracji | Wyrób medyczny inny |
| Substancja czynna  | -                   |

### Opis produktu

**Opis WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE:** po operacjach jamy brzusznej - pas ułatwia poruszanie się, zmniejsza ryzyko wystąpienia przepukliny, pooperacyjnej ogranicza powiększanie się istniejących przepuklin brzusznych, np. pępkowych, pooperacyjnych pas wspomaga leczenie w przypadku rwy kulszowej w przebiegu chorób zwyrodnieniowo – zapalnych stawów pas ma działanie ochraniające i łagodzi ból pas wzmacnia mięśnie brzucha i zapobiega opuszczeniu trzewi jamy brzusznej ma działanie ocieplające. Instrukcja używania: Dopasowanie rozmiaru: W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu brzucha, a następnie wybrać rozmiar z tabeli na opakowaniu. Obwód brzucha

**WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE:** po operacjach jamy brzusznej - pas ułatwia poruszanie się, zmniejsza ryzyko wystąpienia przepukliny, pooperacyjnej ogranicza powiększanie się istniejących przepuklin brzusznych, np. pępkowych, pooperacyjnych pas wspomaga leczenie w przypadku rwy kulszowej w przebiegu chorób zwyrodnieniowo – zapalnych stawów pas ma działanie ochraniające i łagodzi ból pas wzmacnia mięśnie brzucha i zapobiega opuszczeniu trzewi jamy brzusznej ma działanie ocieplające. Instrukcja używania: Dopasowanie rozmiaru: W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu brzucha, a następnie wybrać rozmiar z tabeli na opakowaniu. Obwód brzucha 91-100 cm Sposób zakładania: Odpiąć rzep. Pas ułożyć obejmując brzuch i odcinek lędźwiowo – krzyżowy, tak by zapięcie na rzep przypadło z przodu. Pas zapiąć regulując indywidualnie w obrębie zapięcia. Uwaga! Nie stosować bezpośrednio na rany lub uszkodzoną skórę. Przechowywanie: W oryginalnym opakowaniu, suchym i zacienionym miejscu. Przepis prania: Prać ręcznie w wodzie o temp. 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania wełny. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie prasować! Nie chlorować! Uwagi: Stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem. W czasie noszenia pasa zalecane jest wykonywanie podstawowego zestawu ćwiczeń rehabilitacyjnych. Ciągłe stosowanie pasa bez wykonywania ćwiczeń może doprowadzić do osłabienia mięśni brzucha. Pas zapinany jest na rzep. Szerokość pasa 22 cm. Produkt jest dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Deklaracja Zgodności CE wytwórcy. Sposób zakładania: Odpiąć rzep. Pas ułożyć obejmując brzuch i odcinek lędźwiowo – krzyżowy, tak by zapięcie na rzep przypadło z przodu. Pas zapiąć regulując indywidualnie w obrębie zapięcia. Uwaga! Nie stosować bezpośrednio na rany lub uszkodzoną skórę. Przechowywanie: W oryginalnym opakowaniu, suchym i zacienionym

miejscu. Przepis prania: Prać ręcznie w wodzie o temp. 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania wełny. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie prasować! Nie chlorować! Uwagi: Stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem. W czasie noszenia pasa zalecane jest wykonywanie podstawowego zestawu ćwiczeń rehabilitacyjnych. Ciągłe stosowanie pasa bez wykonywania ćwiczeń może doprowadzić do osłabienia mięśni brzucha. Pas zapinany jest na rzep. Szerokość pasa 22 cm. Produkt jest dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Deklaracja Zgodności CE wytwórcy. Sposób zakładania: Odpiąć rzep. Pas ułożyć obejmując brzuch i odcinek lędźwiowo – krzyżowy, tak by zapięcie na rzep przypadało z przodu. Pas zapiąć regulując indywidualnie w obrębie zapięcia. Uwaga! Nie stosować bezpośrednio na rany lub uszkodzoną skórę. Przechowywanie: W oryginalnym opakowaniu, suchym i zacienionym miejscu. Przepis prania: Prać ręcznie w wodzie o temp. 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania wełny. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie prasować! Nie chlorować! Uwagi: Stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem. W czasie noszenia pasa zalecane jest wykonywanie podstawowego zestawu ćwiczeń rehabilitacyjnych. Ciągłe stosowanie pasa bez wykonywania ćwiczeń może doprowadzić do osłabienia mięśni brzucha. Pas zapinany jest na rzep. Szerokość pasa 22 cm. Produkt jest dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Deklaracja Zgodności CE wytwórcy.