

## PANI TERESA Pończochy uciskowe SOFT czarne rozmiar 2



Cena: 42,99 PLN

### Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	SIGVARIS S.A.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

### Opis produktu

**Opis**Pani Teresa Pończochy przeciwżylakowe uciskowe Soft czarny r.2 1 para to wyrób medyczny wielorazowego użytku przeznaczony do stosowania w zaburzeniach funkcyjnych, takich jak uczucie ciężkości i zmęczenia nóg. Właściwości Symbol: 486C2. Rozmiar 2. Kolor czarny. Wielorazowego użytku. Wyrób medyczny. Pończochy przeciwżylakowe uciskowe Soft są przyjemne w dotyku i łagodne dla skóry. Stosowanie pończosznicych wyrobów uciskowych, takich jak pończochy ma korzystny wpływ na łagodzenie objawów niewydolności żylny, jak ciężkość nóg, uczucie obrzęku czy ból. Wyrób medyczny jest przeznaczony do stosowania na kończyny dolne. Wskazania zaburzenia funkcyjne takie jak uczucie ciężkości i zmęczenia nóg, przy obecnej chorobie żylakowej (C0)\*\*wg klasyfikacji CEAP **Sposób użycia** Przy zakładaniu i zdejmowaniu należy zachować szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić delikatnej struktury wyrobu np. paznokciem, zegarkiem lub biżuterią. Zaleca się stosowanie gumowych rękawic. Również nieodpowiednia pielęgnacja stóp oraz uszkodzone wnętrze obuwia mogą doprowadzić do powstania przetarć i uszkodzenia wyrobu. Zakładanie Wyrób należy zakładać tuż po wstaniu, gdy obrzęk nóg jest najmniejszy. Nie należy ciągnąć wyrobu do góry, lecz delikatnymi ruchami, najlepiej używając gumowych rękawic, płasko ułożonymi dłońmi równomiernie rozciągać materiał na nodze. Zdejmowanie Należy chwycić wyrób za górną krawędź i delikatnie ściągnąć w kierunku pięt. Prawidłowe ułożenie Podkolanówka jest prawidłowo założona, gdy górna krawędź mankietu znajduje się na wysokości 2 palców poniżej dołu podkolanowego.