

PANI TERESA Rajstopy przeciwżylakowe SOFT, rozmiar 4, jasny beż



Cena: 47,76 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	SIGVARIS S.A.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

OpisPrzewidziane zastosowanie:Stosowanie pończosznicych wyrobów uciskowych ma korzystny wpływ na łagodzenie objawów niewydolności żylny, takich jak ciężkość nóg, uczucie obrzęku i ból. Wyrób jest przeznaczony do stosowania na kończyny dolne. Wyrób wielorazowego użytku.Wskazania:zaburzenia funkcyjne takie jak uczucie ciężkości i zmęczenia nóg, przy obecnej chorobie żylakowej (C0)** wg klasyfikacji CEAP**Sposób użycia**Przy zakładaniu i zdejmowaniu należy zachować szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić delikatnej struktury wyrobu np. paznokciem, zegarkiem lub biżuterią. Zaleca się stosowanie gumowych rękawic. Również nieodpowiednia pielęgnacja stóp oraz uszkodzone wnętrza obuwia mogą doprowadzić do powstania przetarć i uszkodzenia wyrobu.ZakładanieWyrób należy zakładać tuż po wstaniu, gdy obrzęk nóg jest najmniejszy. Nie należy ciągnąć wyrobu do góry, lecz delikatnymi ruchami, najlepiej używając gumowych rękawic, płasko ułożonymi dłońmi równomiernie rozciągać materiał na nodze.ZdejmowanieNależy chwycić wyrób za górną krawędź i delikatnie ściągnąć w kierunku pięt.Prawidłowe ułożeniePodkolanówka jest prawidłowo założona, gdy górna krawędź mankietu znajduje się na wysokości 2 palców poniżej dołu podkolanowego.**Skład**Elastan 55%, Poliamid 45%