

PANI TERESA Skarpety podróżne TRAVEL SOCKS FOR WOMEN czarne rozmiar M



Cena: 33,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	SIGVARIS S.A.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Opis Skarpety podróżne PANI TERESA® TRAVEL SOCKS FOR WOMEN zmienny ucisk 15 - 21 mmHg Wielkość obuwia: 38-40 cm PANI TERESA® TRAVEL Profesjonalna linia profilaktycznych skarpet podróżnych PANI TERESA® TRAVEL, stymulując krążenie krwi, zapewnia uczucie komfortu i ulgi dla zmęczonych nóg. Skarpety wykorzystują zmienny, stopniowany ucisk na poziomie 1 klasy kompresji (15-21 mmHg), najsilniejszy w kostce i stopniowo słabnący w kierunku kolana, aby przynieść ulgę nawet najbardziej zmęczonym nogom. Jeżeli spędzasz dużo czasu w samochodzie, w samolocie, w biurze, w pozycji siedzącej lub stojącej i odczuwasz dolegliwości związane z obrzękami i bólem nóg, linia PANI TERESA® TRAVEL jest właśnie dla Ciebie! **KOMFORT PODRÓŻOWANIA** Stosuj skarpety podróżne przeciwżylakowe PANI TERESA® TRAVEL, aby wyeliminować uczucie ciężkich nóg przy długotrwałym przebywaniu w pozycji siedzącej oraz żeby zapobiegać tworzeniu się niebezpiecznych dla zdrowia zakrzepów podczas długich podróży. Skarpety podróżne TRAVEL® to wyjątkowy, nieinwazyjny sposób dbania o zdrowie nóg – niewymagający przyjmowania szkodliwych dla układu trawiennego tabletek lub używania maści i żeli. Noszenie skarpet podróżnych PANI TERESA® TRAVEL sprawi, że nawet po całym dniu spędzonym na stojąco lub siedząco Twoje nogi nadal będą wypoczęte i lekkie. **ULGA DLA ZMĘCZONYCH NÓG** Linia produktów TRAVEL® stworzona przez ekspertów w dziedzinie kompresjoterapii, według rygorystycznych norm europejskich, gwarantuje potwierdzoną skuteczność działania. Każda para jest kontrolowana z najwyższą dbałością o szczegóły, dlatego produkty są mocne i trwałe. Skarpety podróżne PANI TERESA® TRAVEL są zarejestrowanym wyrobem medycznym zapewniającym parametry umożliwiające uzyskanie właściwych efektów zdrowotnych. PANI TERESA MEDICA SA jest jedynym polskim producentem, wytwarzającym wyroby kompresyjne – przeciwżylakowe. Wskazane dla osób: prowadzących aktywny tryb życia, odczuwających zmęczenie i ciężkość nóg, zwłaszcza wieczorem, z tendencją do obrzęków kończyn dolnych, pozostających długotrwale w pozycji siedzącej, często podróżujących. **Przeciwwskazania:** Miażdżyca tętnic kończyn dolnych, choroba Buergera, tzw. stopa cukrzycowa. **Instrukcja używania:** Dopasowanie rozmiaru: W celu prawidłowego dobrania rozmiaru należy wybrać rozmiar z tabeli zgodny z rozmiarem noszonego obuwia. **Sposób nakładania:** 1. Produkt nakładać od palców do kostki, rozprowadzić równomiernie na stopie. 2. Zwrócić uwagę na dokładne umieszczenie pięty. 3. Nałożyć produkt do kolana. Dokładnie rozprowadzić na łydce do pełnej długości zmniejszając nieco napięcie wynikające z nakładania. 4. Wygładzić wszystkie zgrubienia i zmarszczenia. **Uwagi:** Przy używaniu skarpet należy uważać, aby nie uszkodzić wyrobu ostrymi przedmiotami: pierścieniem, zegarkiem, paznokciami. Nieprawidłowa pielęgnacja pięt oraz noszenie niewłaściwego obuwia (np. wkładki w obuwiu zwiększające tarcie) może przyczynić się do powstawania przetarć i uszkodzenia

produktu. W razie wystąpienia ostrego bólu lub podrażnienia skóry podczas noszenia wyrobu, wyrób natychmiast zdjąć i skonsultować się z lekarzem. Przepis prania: Prać w wodzie o temp. 40°C, prać w delikatnych środkach piorących, nie prasować, nie chlorować, nie wybielać, nie czyścić chemicznie, suszyć w stanie rozłożonym, z dala od źródeł ciepła. Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i zacienionym miejscu.