

PANI TERESA Stabilizator stawu kolanowego S



Cena: 61,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	SIGVARIS S.A.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

OpisPANI TERESA Stabilizator stawu kolanowego S Niezwykle funkcjonalny stabilizator stawu kolanowego zabezpiecza przed kontuzjami stawu podczas uprawiania sportu lub w czasie wzmożonego wysiłku. Okaze się bardzo przydatny przy wzmacnianiu stawów, zmniejsza ryzyko powstawania ponownej kontuzji, a po urazie przyspiesza jego leczenie. Dodatkowo koryguje oś stawu i odciąża powierzchnie stawowe kłykci uda i piszczeli po przebyłym złamaniu. Zabezpiecza także przed przeciążeniami aparatu więzadłowego-torebkowego, łagodzi bóle. Stabilizator jest miły w noszeniu. Jego dużym atutem jest, że nie ogranicza ruchów. Wykonany został z elastycznego neoprenu, który bez problemu dopasowuje się do anatomii kolana. skład: Stabilizator stawu kolanowego, neoprenowy, czarny Pani Teresa Medica 90% neopren 10% poliamid zabezpiecza przed kontuzjami stawu podczas uprawiania sportu lub w czasie wzmożonego wysiłku wzmacnia staw zmniejsza ryzyko powstawania ponownej kontuzji przyspiesza leczenie kontuzji koryguje oś stawu odciąża powierzchnie stawowe kłykci uda i piszczeli po przebyłym złamaniu zabezpiecza przed przeciążeniami aparatu więzadłowo-torebkowego nie ogranicza ruchów Dopasowanie rozmiaru: w celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu miejsca wskazanego w tabeli, a następnie wybrać rozmiar Sposób zakładania: stabilizator założyć poprzez naciągnięcie do dołu na wysokość stawu kolanowego tak, by dokładnie dopasować otwór na rzepkę kolanową Przechowywanie: w oryginalnym opakowaniu, w suchym i zacienionym miejscu. Przepis prania: prać ręcznie w wodzie o temperaturze 40 °C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania wełny nie dopuszczać do silnego zabrudzenia! nie prasować! nie chlorować! Uwagi: stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem o czasie stosowania wyrobu decyduje lekarz w razie wystąpienia ostrego bólu lub podrażnienia skóry podczas noszenia wyrobu, wyrób natychmiast zdjąć i skonsultować się z lekarzem ciągłe stosowanie wyrobu, bez wykonywania ćwiczeń wzmacniających mięśnie, może doprowadzić do osłabienia mięśni nie jest wskazane stosowanie wyrobu przez całą dobę nie stosować wyrobu na uszkodzoną lub chorobowo zmienioną skórę nie stosować wyrobu jeżeli wcześniej użyto np. maści, żeli, kremów rozgrzewających nie stosować w przypadku niewłaściwego dobrania rozmiaru wyrób zbyt ciasny może pogorszyć krążenie krwi brak codziennej higieny osobistej lub niewłaściwa konserwacja wyrobu mogą spowodować otarcia naskórka, powstawanie odczynów alergicznych związanych ze wzmożoną potliwością i rozwojem flory bakteryjnej Tabela rozmiarów: rozmiar obwód nogi nad kolanem S 30 - 38 cm M 39 - 47 cm L 48 - 54 cm XL 55 - 61 cm XXL 62 - 68 cm