

## PANI TERESA Stabilizator stawu skokowego z taśmą M



Cena: 56,69 PLN

### Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	SIGVARIS S.A.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

### Opis produktu

**Opis**PANI TERESA Stabilizator stawu skokowego z taśmą MStabilizator stawu skokowego z taśmą Pani TERESA to produkt ortopedyczny wzmacniający i stabilizujący staw. Został stworzony, by chronić przed urazami, zapewniać bezpieczeństwo i komfort nawet przy wzmożonym wysiłku fizycznym. Produkt składa się z neoprenu (90%) i poliamidu (10%). Można go stosować w obuwiu.**WSKAZANIA/ ZASTOSOWANIE:**zmniejsza ryzyko powstania kontuzji stawu, np. podczas uprawiania sportu lub w czasie wzmożonego wysiłkuzabezpiecza przed ponownymi urazami stawuprzyspiesza leczenie kontuzjiłagodzi bólezmniejsza obrzęknie ogranicza ruchów**INSTRUKCJA UŻYWANIA:**Dopasowanie rozmiaru: W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu miejsca wskazanego w tabeli, a następnie wybrać rozmiar.**TABELA ROZMIARÓW:**ROZMIAROBWÓD NOGI NAD KOSTKĄ (CM)S 9-22M 23-25L 26-28XL 29-31XL 32-34**SPOSÓB ZAKŁADANIA:**Odpiąć rzepy. Stabilizator nałożyć na wysokość stawu skokowego, umieszczając piętę w otworze, zapiąć na rzepy. Następnie nałożyć na staw skokowy taśmę wzmacniającą, krzyżując ją na przegubie stopy, zapiąć na rzepy.**PRZECHOWYWANIE:**W oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, w suchym i zacienionym miejscu.**PRZEPIS PRANIA:**Przed praniem zapiąć rzepy w celu uniknięcia zahaczenia wyrobu. Prać ręcznie w wodzie o temp. 40oC przy użyciu delikatnych środków piorących. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie należy prasować i chlorować.