

PANI TERESA Temblak kończyny górnej rozmiar XL bez nadruku



Cena: 43,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	SIGVARIS S.A.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Opis PANI TERESA Temblak kończyny górnej rozmiar XL bez nadruku Temblak kończyny górnej składa się z obszernej kieszeni na przedramię, wewnątrz której znajduje się otwór na kciuk, który gwarantuje utrzymanie ręki w prawidłowej pozycji. Szeroki wygodny pas nośny przekłada się przez zdrowe ramię (na skos) dopasowując jego długość za pomocą rzepów. Zabezpieczenia ochronne na taśmie układa się na szyi, aby zabezpieczyć skórę przed otarciami. Wskazania w niedowładach kończyny górnej np. po udarze mózgu jako opatrunek podtrzymujący opatrunek gipsowy po zdjęciu opatrunku gipsowego – podczas rehabilitacji jako opatrunek doraźny w przypadku złamania kości przedramienia lub zwichnięcia stawu łokciowego. Specyfikacja techniczna W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu klatki piersiowej, a następnie wybrać rozmiar z tabeli na opakowaniu. Obwód klatki piersiowej cm - >107 **Sposób użycia** Są dwa sposoby zakładania wyrobu: Podwieszkę przełożyć przez szyję, przedramię umieścić w „oczku” podwieszki. Odpowiednią długość podwieszki wyregulować indywidualnie za pomocą rzepów. Przedramię umieścić w „oczku” podwieszki, pasek podwieszki przełożyć do tyłu, przez plecy, szyję i drugie ramię, a następnie z przodu umieścić przedramię w drugim oczku podwieszki. Odpowiednią długość podwieszki wyregulować indywidualnie za pomocą rzepów.