

## PANI TERESA Temblak siatkowy M 1 sztuka



Cena: 31,99 PLN

### Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	SIGVARIS S.A.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

### Opis produktu

**Opis** WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE: jako opatrunek podtrzymujący opatrunek gipsowy po zdjęciu opatrunku gipsowego – podczas rehabilitacji jako opatrunek doraźny w przypadku złamania kości przedramienia lub zwichnięcia stawu łokciowego  
Obwód klatki piersiowej : 60 – 75 cm  
Instrukcja używania: Dopasowanie rozmiaru: W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu klatki piersiowej, a następnie wybrać rozmiar z tabeli na opakowaniu.  
Sposób zakładania: Przedramię umieścić w kieszeni temblaka, kciuk zawiesić w przeznaczonym do tego „oczku” w wewnętrznej części temblaka. Taśmę przełożyć przez zdrowe ramię dopasowując odpowiednio jej długość za pomocą rzepów, a wzmocnienie ochronne na taśmie układając na szyi.  
Przechowywanie: W oryginalnym opakowaniu, w suchym i zacienionym miejscu.  
Przepis prania: Prać ręcznie w temperaturze 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania wełny. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia! Nie prasować! Nie chlorować!  
Uwagi: Stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem. Produkt jest dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Deklaracja Zgodności CE wytwórcy.