

PASOMED Kompresy niejałowe 13N 8W 5 x 5 cm, 100 szt.



Cena: 4,02 PLN

Opis słownikowy

CE	2274
Opakowanie	100 szt.
Producent	PASO-TRADING SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Opis PASOMED Kompresy niejałowe z gazy bawełnianej 5 x 5 cm, 13-nitkowe, 8-warstwowe

Przeznaczenie: Wyrób medyczny niejałowy, można stosować do przemywania nieuszkodzonej skóry. Po sterylizacji, jako wyrób jałowy można stosować do bezpośredniego opatrywania uszkodzonej skóry jako bariera mechaniczna oraz w celu absorpcji wysięków powstałych podczas zabiegów chirurgicznych oraz w wyniku urazów.

Środki ostrożności: Przed użyciem sprawdzić stan opakowania - nie używać jeśli opakowanie jest otwarte lub uszkodzone. Podczas procedur inwazyjnych wyrób stosować w stanie nierozwiniętym. Po przesiąknięciu, opatrunek wymienić na nowy. Stosować nie dłużej niż 24 godziny od chwili założenia lub postępować według zaleceń lekarza. Używać do czasu zagojenia rany. Wyrób do użytku jednorazowego - ponowne użycie jest zabronione, grozi zakażeniem. Nie sterylizować powtórnie. Po użyciu wyrób traktować jako odpad medyczny - potencjalne źródło zakażenia.

Przeciwwskazania: Wyróbu niejałowego nie stosować bezpośrednio na uszkodzoną skórę.

Informacja dla personelu medycznego: Wyrób niejałowy przeznaczony do sterylizacji. W celu przeprowadzenia sterylizacji należy przepakować wyrób w opakowanie właściwe dla metody sterylizacji. Sterylizować parą wodną w temperaturze 121°C, pod ciśnieniem 115+125 kPa, przez 30 minut, w procesie zwalidowanym.

Uwaga: Paso-Trading Sp. z o.o. nie odpowiada za walidację, regularną kontrolę i monitorowanie procesu sterylizacji, realizowane przez użytkownika końcowego.

Podmiot odpowiedzialny: Paso-Trading Sp. z o.o.