

## PASOSLEEP Wake Up Rested Plastry przeciw chrapaniu Standard 10 sztuk



Cena: 18,49 PLN

### Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	10 szt.
Postać	-
Producent	PASO-TRADING SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

### Opis produktu

**Opis** Plastry przeciw chrapaniu swoje przewidziane zastosowanie uzyskują dzięki „mechanicznemu działaniu”, rozszerzają nozdrza ułatwiając oddychanie i tym samym pomagają zmniejszyć chrapanie oraz łagodzą dyskomfort spowodowany przekrwieniem błony śluzowej nosa. Stosować przed snem. **Sposób użycia** 1. Ostrożnie oczyść i osusz skórę nosa. 2. Wyjmij plaster z opakowania bezpośredniego i odklej część ochronną. 3. Naklej plaster na skórę, w poprzek nosa i przyciskając palcami odczekaj kilka sekund, aż plaster przylegnie mocno do skóry. 4. W celu usunięcia plastra chwyć za jego krawędź i usuwaj powoli wzdłuż skóry, aż do całkowitego odklejenia. Czynność odklejania najlepiej wykonuj w trakcie mycia twarzy lub biorąc prysznic ciepłą wodą.