

PASOSLEEP Wake Up Rested Plastry przeciw chrapaniu XL 10 sztuk



Cena: 18,49 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	10 szt.
Postać	-
Producent	PASO-TRADING SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

WłaściwościPlastry przeciw chrapaniu swoje przewidziane zastosowanie uzyskują dzięki „mechanicznemu działaniu”, rozszerzają nozdrza ułatwiając oddychanie i tym samym pomagają zmniejszyć chrapanie oraz łagodzą dyskomfort spowodowany przekrwieniem błony śluzowej nosa. Stosować przed snem.**Sposób użycia**1. Ostrożnie oczyść i osusz skórę nosa.2.Wyjmij plaster z opakowania bezpośredniego i odklej część ochronną.3. Naklej plaster na skórę, w poprzek nosa i przyciskając palcami odczekaj kilka sekund, aż plaster przylegnie mocno do skóry.4. W celu usunięcia plastra chwyć za jego krawędź i usuwaj powoli wzdłuż skóry, aż do całkowitego odklejenia. Czynność odklejania najlepiej wykonuj w trakcie mycia twarzy lub biorąc prysznic ciepłą wodą.**Ważne**Wyrób tylko do użytku jednorazowego, zewnętrznego. Nie stosować, jeśli opakowanie bezpośrednie plastra jest uszkodzone. Stosować wyłącznie na oczyszczoną, nieuszkodzoną i niepodrażnioną skórę. Stosować nie dłużej niż 8 godzin. Nie stosować u dzieci poniżej 5 roku życia. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry natychmiast przerwać stosowanie i zasięgnąć porady lekarza. Plaster nie będzie skuteczny w przypadku trudności w oddychaniu związanych z niedrożnością nosa spowodowaną np. infekcją górnych dróg oddechowych, problemami anatomicznymi, takimi jak skrzywienie przegrody nosowej czy bezdech senny. Każdy poważny incydent należy zgłosić do producenta i właściwego organu.**Składniki**Rozmiar plastrów:XL: 67 x 20 mm.**Producent**Podmiot odpowiedzialny: Paso-trading Sp. Z o.o.