

PESSAR Krążek ginekologiczny kołnierzowy szyjki macicy nr 3



Cena: 154,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	HERBICH MICHAEL ZIELONA GÓRA
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Właściwości Wskazania niewydolność ciśnieniowo-szyjkowa u kobiet w ciąży **Sposób użycia** Warunki założenia dla lekarza specjalisty szyjka macicy nie może być całkowicie skrócona; wystarczy 0,5 cm kontrola we wziernikach czy nie ma zapalenia pochwy, jeżeli istnieje możliwość, to stosuje się badanie mikroskopowe wymazu pochwy, pH pochwy, przez lekarza prowadzącego przy wadach wrodzonych macicy pessar kołnierzowy szyjki macicy nie spełni swojej roli przyczyną bóli przedwczesnych jest często zapalenie pochwy. Jeżeli istnieje możliwość, to stosuje się wymaz bakteriologiczny i badanie w kierunku Chlamydii. Może również być założony po wykonaniu szwu okrężnego dla podparcia szyjki macicy celem podniesienia aparatu więzadłowego **Ważne** Rozmiary: Nr 1 – wysokość ściany bocznej 17 mm (wąska pochwa, pierwiastki) Nr 2 – wysokość ściany bocznej 21 mm (średnia pochwa, stosowany standardowo w 95% przypadków) Nr 3 – wysokość ściany bocznej 25 mm (średnia pochwa, wieloródki) Elastyczny i wytrzymały silikon, który jest hipoalergiczny i nie pochłania brzydkich zapachów ani wydzielin. Możliwość sterylizacji w autoklawie. Gwarancja Jakości i Bezpieczeństwa Produktu – Certyfikat Zgodności CE