

## PESSAR Krążek ginekologiczny pierścieniowy gruby 100mm



Cena: 128,00 PLN

### Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	HERBICH MICHAEL ZIELONA GÓRA
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

### Opis produktu

**Opis PESSAR Krążek ginekologiczny pierścieniowy gruby 100mm**  
**Twardy:** stosowany przy dużych wejściach do pochwy  
**Miękki:** przy wejściach wąskich  
**Rozmiary:** od 50 mm do 100 mm (co 5 mm)  
**Częstotliwość wymiany** ustala lekarz (przeciętnie co 4 – 12 tygodni) lub wg wskazań zawartych w instrukcji użytkowania. Okres używalności przez pacjentkę do 3 lat bez potrzeby wymiany pessara na nowy  
**Elastyczny i wytrzymały silikon**, który jest hipoalergiczny i nie pochłania brzydkich zapachów ani wydzieliny  
**Możliwość wymiany pessara w ciągu 90 dni** (dotyczy wybranych modeli)  
**Możliwość sterylizacji w autoklawie.**  
**Gwarancja Jakości i Bezpieczeństwa Produktu – Certyfikat Zgodności CE**  
**Wskazania** - obniżenie pochwy i macicy - niezbyt nasilone wysiłkowe nietrzymanie moczu - poporodowe zespoły bólowe miednicy mniejszej  
**Jak dobrać rozmiar pessara**  
**Dobór typu oraz rozmiaru pessara** powinien dokonać lekarz specjalista podczas badania ginekologicznego. Prawidłowy dobór odpowiedniego modelu może zniwelować lub całkowicie zlikwidować dolegliwości statyki narządu rodowego. Ogólna zasada w doborze rozmiaru pessara ginekologicznego to pomiar szerokości wejścia do pochwy za pomocą 2-óch palców wskazującego i środkowego + ok 1 -1.5 cm. Po założeniu pessara lekarz powinien móc swobodnie włożyć palec wskazujący pomiędzy pessar a ścianę pochwy (nie dotyczy pessara kostkowego). Pessar po założeniu powinien sprawiać wrażenie, że jest lekko za mały. Po 1-2 tygodniach będzie dopasowany (uprzedzamy pacjentkę, aby go nie zgubiła w toalecie) Po pierwszym założeniu, aby upewnić się, że został zastosowany odpowiedni rozmiar, lekarz powinien poprosić pacjentkę, aby wstała, usiadła, przeszła się, zakaszła i przykucnęła, upewniając się przy tym, że pessar nie zmienił swojego umiejscowienia. Pacjentka nie powinna czuć, że ma założony pessar.