

PIC SOLUTION THERMOGEL COMFORT 10 x 26 cm z paskiem

Cena: 23,60 PLN



Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	PIKDARE S.R.I.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Opis PIC SOLUTION THERMOGEL COMFORT 10 x 26 cm z paskiem Kompres wielokrotnego użytku do terapii ciepłem/zimnem. Dzięki ochronnemu pokrowcowi może być stosowany bezpośrednio na skórę. Elastyczna taśma gwarantuje stabilne i skuteczne mocowanie. Wymiary: 10 x 26 cm. **Działanie** Wykorzystuje naturalną moc terapeutyczną ciepła i zimna w bezpieczny sposób. Dzięki specjalnemu pokryciu, może być stosowany bezpośrednio na skórę. Kompres wypełniony jest nieszroniącym żelem "no frost". **Sposób użycia** Przygotowanie okładu ciepłego: ogrzać ThermoGel w gorącej wodzie (max. 60°C) lub podgrzać zanurzony w wodzie w kuchenke mikrofalowej (6 minut). Przygotowanie okładu zimnego: schłodzić ThermoGel w zamrażalniku przez minimum 2 godziny.