

PINEMED Pieluszka dziecięca z woreczkiem do pobierania moczu 11+ kg, 1 szt.



Cena: 25,94 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie	1 szt.
Producent	TRADIX GROUP SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis PINEMED Pieluszka dziecięca z woreczkiem do pobierania moczu 11+ kg

Pinemed to prosty sposób na pobranie moczu u dziecka. Jest to pieluszka, która umożliwia pobranie próbki moczu do badań od dzieci i niemowląt w komfortowy i nieinwazyjny sposób bez ryzyka kontaminacji próbki.

Ryzyko kontaminacji próbki pobranej przez Pinemed wynosi jedynie 3,57%, czyli nawet o 7-60% mniejsze niż przy obecnie stosowanych metodach nieinwazyjnych.

Sposób użycia

Umyj ręce przed użyciem wyrobu. Umyj okolice narządów płciowych dziecka przed użyciem wyrobu. Wyciągnij pieluszkę Pinemed z opakowania. Wyprostuj woreczek na mocz połączony z pieluszką ciągnąc go w dół. Załóż dziecku pieluszkę tak jak zawsze.

WAŻNE! Rekomenduje się nie zakładać dolnej części ubrania podczas noszenia pieluszki Pinemed. Wyrób przeznaczony jest do używania u dzieci chodzących lub raczkujących. Nie używaj produktu, gdy dziecko znajduje się w pozycji siedzącej lub leżącej. U dzieci, które jeszcze nie raczkują czy nie stoją, wyrób może być stosowany podczas trzymania dziecka na rękach. Po pobraniu moczu delikatnie oddziel woreczek na mocz lub odetnij od pieluszki i przelej zawartość do pojemnika na mocz. Zabierz próbkę moczu do laboratorium w ciągu 90 min, zgodnie z zaleceniem twojego lekarza.

Składniki Pieluszka dziecięca z woreczkiem do pobierania moczu **Ważne**

Przechowywać w temperaturze do 50 st. C, chronić przed wilgocią, trzymać z daleka od światła słonecznego. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Nie używać jeżeli opakowanie jest uszkodzone. Wyrób jednorazowego użytku. Nie używać ponownie. Zużyty wyrób zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

ProducentProducent:

Arkan Grup Sağlık Ürünleri A.Ş. Velimeşe Mah. Hacı Şeremet Cad. No: 14 Ergene Tekirdağ

Dystrybutor:

Tradix Group Sp. z o.o. ul. Grzybowska 8700-844 Warszawa