

PINEMED Pieluszka dziecięca z woreczkiem do pobierania moczu 5-11 kg 1 sztuka



Cena: 24,49 PLN

Opis słownikowy

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Dawka | - |
| Opakowanie | 1 szt. |
| Postać | - |
| Producent | TRADIX GROUP SP. Z O.O. |
| Rodzaj rejestracji | Wyrób medyczny inny |
| Substancja czynna | - |

Opis produktu

Właściwości Pinemed to prostszy sposób na pobranie moczu u dziecka. Jest to pierwsza i unikalna na świecie pieluszka, która umożliwia pobranie próbki moczu do badań od dzieci i niemowląt w komfortowy i nieinwazyjny sposób bez ryzyka kontaminacji próbki. Ryzyko kontaminacji próbki pobranej przez Pinemed wynosi jedynie 3,57%, czyli nawet o 7-60% mniejsze niż przy obecnie stosowanych metodach nieinwazyjnych*. *Badanie przeprowadzone w okresie kwiecień – październik 2022 na grupie 102 dzieci (70 dziewczynek, 32 chłopców). Wyniki pozytywne badań próbek moczu zostały potwierdzone poprzez cewnikowanie. Zgodność na poziomie 96,43% pod względem gatunkowym oraz liczby jednostek koloniotwórczych. **Sposób użycia** Umyj ręce przed użyciem wyrobu. Umyj okolice narządów płciowych dziecka przed użyciem wyrobu. Wyciągnij pieluszkę Pinemed z opakowania. Wyprostuj woreczek na mocz połączony z pieluszką ciągnąc go w dół. Załóż dziecku pieluszkę tak jak zawsze. **WAŻNE!** Rekomenduje się nie zakładać dolnej części ubrania podczas noszenia pieluszki Pinemed. Wyrób przeznaczony jest do używania u dzieci chodzących lub raczkujących. Nie używaj produktu, gdy dziecko znajduje się w pozycji siedzącej lub leżącej. U dzieci, które jeszcze nie raczkują czy nie stoją, wyrób może być stosowany podczas trzymania dziecka na rękach. Po pobraniu moczu delikatnie oddziel woreczek na mocz lub odetnij od pieluszki i przelej zawartość do pojemnika na mocz. Zabierz próbkę moczu do laboratorium w ciągu 90 min, zgodnie z zaleceniem twojego lekarza. **Ważne** Warunki przechowywania: Przechowywać w temperaturze do 50 st. C, chronić przed wilgocią, trzymać z daleka od światła słonecznego. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Nie używać jeżeli opakowanie jest uszkodzone. Wyrób jednorazowego użytku. Nie używać ponownie. Zużyty wyrób zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. **Producent** Producent: Arkan Grup Sağlık Ürünleri A.Ş. Velimeşe Mah. Hacı Şeremet Cad. No: 14 Ergene Tekirdağ **Dystrybutor:** Tradix Group Sp. z o.o. ul. Grzybowska 8700-844 Warszawa