

## PINK DUO 2 testy ciążowe płytkowy + strumieniowy



Cena: 6,10 PLN

### Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	2 szt.
Postać	-
Producent	HYDREX DIAGNOSTICS SP. Z O.O.SP.K.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

### Opis produktu

**Właściwości**PINK DUO 2 testy ciążowe płytkowy + strumieniowy Pink Strumieniowy Super Czuły jest szybkim i wysoce czułym testem ciążowym służącym do wykrywania ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (hCG) - hormonu, który występuje w moczu kobiet w ciąży. Czułość testu Pink Strumieniowy Super Czuły została ustawiona na 10 mIU/ml. Zasada działania testu ciążowego oparta jest na reakcji hormonu hCG znajdującego się w moczu kobiety w ciąży z monoklonalnymi przeciwciałami anty-hCG, które zostały naniesione na test.**Sposób użycia**Test strumieniowy:Otwórz kopertkęWprowadź końcówkę testu pod strumień moczu na 10 sekundOdczekaj 4 minuty i odczytaj wynikTest płytkowy:Otwórz kopertkęNanieś 3 krople moczu na płytkę testowąOdczekaj 5 minut i odczytaj wynik**Ważne**Oba testy są testami jednorazowego użytku. Przed ich wykonaniem należy dokładnie przeczytać dołączoną instrukcję obsługi. Tylko wówczas test zostanie przeprowadzony prawidłowo. - Wyrób medyczny przeznaczony do samokontroli - posiada oznakowanie CE. - Posiada deklarację zgodności UE. - Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim.**Składniki**W opakowaniu 2 testy:Test strumieniowyTest płytkowy**Producent**Domowe Laboratorium