

## PLASTRY na odciski 8 sztuk BIOCANTO CARE



Cena: 7,95 PLN

### Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	8 szt.
Postać	-
Producent	BIOCANTO SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

### Opis produktu

**Opis** Plastry na odciski z centralnie położonym krążkiem z kwasu salicylowego. Działają wygładzająco i ochronnie oraz zmiękczają skórę, co pozwala na szybkie i bezbolesne pozbycie się odcisku. Dodatkowo, pierścień z pianki polietylowej chroni zagrożony obszar skóry przed tarciem i uciskiem. **Sposób użycia** 1. Przed nałożeniem plastra dokładnie oczyść i osusz skórę w okolicach odcisku, aby zapewnić dobrą przyczepność i skuteczność działania. 2. Wyjmij plaster z opakowania bezpośredniego. 3. Zdejmij warstwę ochronną i umieść plaster na skórze, kierując centralny obszar bezpośrednio na odcisk. 4. Zmieniaj plaster codziennie.