

PLASTRY na pęcherze hydrokoloidowe 6 sztuk ZYSKAJ ZDROWIE



Cena: 11,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	6 szt.
Postać	-
Producent	ZYSKAJ ZDROWIE SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

OpisPrzynoszą ulgę w bólu i chronią zmienione chorobowo miejsce przed otarciami i podrażnieniem. Są dyskretne i wygodne w aplikacji, w 100% pokryte hydrokoloidem. Dopasowują się do kształtu ciała i znakomicie pokrywają pęcherze, tworząc optymalne środowisko do szybkiego gojenia. Funkcjonalne opakowanie zawiera trzy rodzaje plastrów, które można stosować na pęcherze stóp lub w innych miejscach ciała. **Sposób użycia**1. Przed użyciem umyj i osusz ręce oraz miejsce, w którym zamierzasz nakleić plaster. 2. Chwyć za niesklejoną krawędź plastra i usuń biały papier zabezpieczający. 3. Trzymając folię ze strzałkami, przyklej plaster tak, aby hydrokoloid pokrywał pęcherz. 4. Usuń z plastra folię oznaczoną strzałkami, dociśnij krawędzie plastra i upewnij się, że dobrze przylegają do skóry. 5. Plaster pozostaw na skórze do momentu, aż sam zacznie się odklejać, jednak nie dłużej niż przez 7 dni. Aby kontynuować terapię wymień plaster na nowy. 6. Jeśli pęcherz pękł, zastosuj łagodny płyn antyseptyczny i nałóż kolejny plaster. 7. W celu usunięcia plastra, złap za krawędź i powoli pociągnij, aż do całkowitego odklejenia.