

PROTEFIX krem mocujący hypoalergiczny 40 ml

Cena: 16,90 PLN

Opis słownikowy

Producent	QUEISSER
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny



Opis produktu

Opis PROTEFIX krem mocujący hypoalergiczny 40 ml Pewnie mocuje protezę i pozwala na spożywanie pokarmów, na jakie ma się ochotę. Uszczelnia protezę i zapobiega przedostawaniu się resztek jedzenia pod protezę, co zmniejsza ryzyko stanów zapalnych. Brak konserwantów, barwników i substancji aromatycznych zmniejsza ryzyko alergii. Przebadany stomatologicznie na osobach skłonnych do alergii. Można stosować dowolnie często, nawet po każdym posiłku. **Sposób użycia** Krem mocujący nałożyć na oczyszczoną, wilgotną lub suchą protezę. Nakładać małą ilość kremu (krótkimi odcinkami), w odstępach jak na rysunku. Potrzeba kilku prób, aby ustalić jaka ilość kremu jest konieczna, a jednocześnie nie wypływa spod protezy. Protezę założyć, przycisnąć, a następnie lekko przygryźć. Krem działa natychmiast po zastosowaniu. Po otwarciu tubki może pojawić się olej, który stanowi bazę kremu. Należy usunąć nadmiar oleju poprzez wyciśnięcie go z tubki; nie wpływa to na siłę mocującą kleju. Po użyciu należy starannie zamknąć tubę, uważając by nie dostała się do niej woda. Wilgoć po dostaniu się do tuby może spowodować stwardnienie kremu mocującego. **Skład** Mieszanka soli sodowych i wapniowych kopolimeru eteru metylowinylowego i bezwodnika kwasu maleinowego, karboksymetyloceluloza, parafina, wazelina, koloidalny dwutlenek krzemu.