

PROTEFIX PODŚCIÓŁKI MOCUJĄCE dla protezy szczęki 30 sztuk



Cena: 15,90 PLN

Opis słownikowy

Producent	QUEISSER
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Opis

PROTEFIX PODŚCIÓŁKI MOCUJĄCE dla protezy szczęki pomoc w szczególnych, trudnych przypadkach

Stosowanie podściółek mocujących jest wskazane w przypadku szczególnie trudnych warunków mocowania protezy w jamie ustnej pacjenta – na przykład przy zaniku wyrostka zębodołowego u pacjentów w podeszłym wieku.

O konieczności stosowania podściółek do protez powinien zdecydować lekarz.

Uwaga

Przy stosowaniu podściółek powinno się je zmieniać po każdym posiłku (po dokładnym oczyszczeniu protezy), ponieważ podściółka pochłania łatwo barwniki pokarmowe i rozmiękczony pokarm. Podściółki mocujące są dostępne w opakowaniach po 30 sztuk.

Zastosowanie

Do mocowania protez zębowych.

Dozowanie i sposób użycia

Szczęka: 1. Sprawdzić wielkość protezy: przy małych protezach należy odpowiednio przyciąć protezę nożyczkami. 2. Zwilżyć podściółkę: zanurzyć podściółkę na ok. 10 sekund w letniej wodzie, a następnie wyjąć i pozwolić wodzie obcieknąć. 3. Nałożyć podściółkę: umieścić podściółkę dowolną stroną na zwilżonej protezie. Tylne 2 mm protezy musi pozostać nie przykryte. 4. Docisnąć podściółkę: podściółkę docisnąć do protezy, zaczynając od środka w kierunku obrzeży, aż podściółka będzie gładko przylegać w każdym miejscu.

Skład

100 g zawiera: alginian sodowy 28 g, włókna wiskozowo-polipropylenowe.