

## ROSSMAX PF120 A Pikflometr dla DOROSŁYCH (Pomiar 60-800 L/min BTPS)

Cena: 29,99 PLN



### Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	STOP NADCIŚNIENIU SP. Z O.O. S.K.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

### Opis produktu

**Opis**Urządzenie świetnie nadaje się do monitorowania chorób dróg oddechowych. Pikflometr Rossmax PF120A służy do pomiaru szczytowego przepływu wydechowego PEF, który określa bardzo ważny wskaźnik czynności płuc. Przy pomocy Rossmax PF120 możemy monitorować i analizować codzienne środki przepływu i zapisywać je w dzienniku. Tak utworzony dziennik jest niezbędny do podejmowania decyzji dotyczących leczenia. Lekarz może wówczas na bieżąco dokonywać zmian stref na pikflometrze Rossmax PF120. W jaki sposób korzystać z Pikflometru Rossmax PF120? W pierwszym kroku należy ustawić czerwony wskaźnik na początku skali. Następnie należy wstać, wziąć głęboki i umieścić usta wokół ustnika i szczelnie go objąć. Pikflometr należy trzymać w pozycji poziomej. Następnie wydmuchaj powietrza bardzo mocno i szybko. Wskazana wartość jest Twoim PEF. Czynność należy powtórzyć 3 razy i na podstawie otrzymanych wyników określić najwyższą wartość PEF. Co oznaczają kolory, które są ustawiane przez lekarza? Zielony: Wszystko jest w porządku i możesz kontynuować leczenie i dotychczasową aktywność. Żółty: Może oznaczać objawy zaostrzenia astmy, należy wtedy postępować zgodnie z wytyczonym planem leczenia umożliwiającym powrót do strefy zielonej. Czerwony: Należy się niezwłocznie skontaktować z lekarzem, objaw ten pojawia się w przypadku ciężkiego zaostrzenia astmy.