

SIKATRIS MAX Plaster na blizny 5/30 1 sztuka

Cena: 78,99 PLN



Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	plast.leczn.
Producent	BIOVENA HEALTH SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Opis SIKATRIS MAX Plaster na blizny 5/30 1 sztuka SIKATRIS Max Silikonowe plastry na blizny to innowacyjne i skuteczne rozwiązanie w profilaktyce i pielęgnacji różnego rodzaju blizn, oparte na wyjątkowych właściwościach żelu silikonowego. Bezpieczeństwo oraz skuteczność silikonu zostały potwierdzone w badaniach klinicznych. SIKATRIS Max poprawia wygląd blizn zarówno starych, jak i świeżych. Transparentna oraz samoprzylepna forma plastra zapewnia dyskrecję oraz komfort stosowania. SIKATRIS Max silikonowy plaster na blizny: Poprawia wygląd blizny oraz zmniejsza jej widoczność (rozjaśnia, wygładza, uelastycznia) Wspomaga rehabilitację blizn pourazowych, poparzeniowych, pooperacyjnych itp. Zapobiega nieprawidłowemu bliznowaceniu Wyrób przeznaczony do wielokrotnego stosowania Wielkość plastra dostosowana m.in do blizn po cesarskim cięciu, operacjach kardiologicznych, abdominoplastyce, oparzeniach i innych. **Sposób użycia** Przed użyciem dokładnie umyć ręce. Delikatnie umyć bliznę i otaczającą ją skórę łagodnym mydłem, spłukać ciepłą wodą. Dokładnie i ostrożnie osuszyć bliznę oraz otaczającą ją skórę. Wyjąć plaster z opakowania, w razie konieczności, przyciąć plaster do rozmiaru blizny zostawiając niewielki naddatek. Ostrożnie usunąć folię ochronną z plastra. Delikatnie przyłożyć stroną samoprzylepną, zaczynając od brzegu blizny, a następnie dokleić do całej powierzchni blizny. Plaster silikonowy, bliznę oraz otaczającą ją skórę należy przemywać, najlepiej dwa razy dziennie przy użyciu łagodnego mydła i spłukiwać ciepłą wodą. Plaster silikonowy może być używany nieprzerwanie przez okres 2–4 tygodni.