

## SIKATRIS Silikonowe Plastry na blizny 10cm x 10cm 5 sztuk



Cena: 62,97 PLN

### Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	5 szt.
Postać	plaster
Producent	BIOVENA HEALTH SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

### Opis produktu

**Właściwości**SIKATRIS to silikonowe plastry przeznaczone do pielęgnacji wszystkich rodzajów blizn, charakteryzujące się łatwością i wygodą stosowania.SIKATRIS poprawia wygląd blizn zarówno starych jak i świeżych. Skuteczny na blizny przerostowe (hipertroficzne) i keloidowe (bliznowce), jak również jako środek profilaktyczny na zamknięte rany, zapobiegający nieprawidłowemu bliznowaceniu.Plastry SIKATRIS:Zmniejszają widoczność bliznyRozjaśniają i wygładzają bliznęWspomagają rehabilitację blizn pourazowych, pooparzeniowych itp.Ultracienkie, wygodne w stosowaniu**Sposób użycia**Przed użyciem dokładnie umyć ręceDelikatnie umyć mydłem bliznę i otaczającą skórę, słucać ciepłą wodą. Ostrożnie osuszyć bliznęWyjąć plaster z opakowaniaW razie konieczności, przyciąć plaster do rozmiaru blizny zostawiając niewielki naddatek (przynajmniej 0,5cm z każdej strony blizny).

- Ostrożnie usunąć folię ochronną z plastra. Delikatnie przyłożyć stroną samoprzylepną, zaczynając od brzegu blizny

Dokleić do całej powierzchni bliznyZaleca się raz dziennie zdjąć plaster, bliznę oczyścić neutralnym mydłem oraz osuszyćPlaster należy zmieniać co 3-5 dni, kiedy utraci właściwości przylegające do skóry, jednak najlepsze efekty można uzyskać przy wymianie plastra co 24 godziny