

# SIKATRIS Silikonowe plastry na blizny po mastopeksji 17 cm x 7,6 cm 1 sztuka



Cena: 16,49 PLN

## Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	BIOVENA HEALTH SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

## Opis produktu

**Właściwości**SIKATRIS to silikonowe plastry przeznaczone do pielęgnacji wszystkich rodzajów blizn, charakteryzujące się łatwością i wygodą stosowania. SIKATRIS poprawia wygląd blizn zarówno starych jak i świeżych. Skuteczny na blizny przerostowe (hipertroficzne) i keloidowe (bliznowce), jak również jako środek profilaktyczny na zamknięte rany, zapobiegający nieprawidłowemu bliznowaceni.Plastry SIKATRIS:Zmniejszają widoczność bliznyRozjaśniają i wygładzają bliznęWspomagają rehabilitację blizn pourazowych, pooparzeniowych itp.Ultracienkie, wygodne w stosowaniu**Sposób użycia**Przed użyciem dokładnie umyć ręceDelikatnie umyć mydłem bliznę i otaczającą skórę, spłukać ciepłą wodą. Ostrożnie osuszyć bliznę. Wyjąć plaster z opakowania. W razie konieczności, przyciąć plaster do rozmiaru blizny zostawiając niewielki naddatek (przynajmniej 0,5cm z każdej strony blizny). Ostrożnie usunąć folię ochronną z plastra. Delikatnie przyłożyć stroną samoprzylepną, zaczynając od brzegu blizny. Dokleić do całej powierzchni blizny. Zaleca się raz dziennie zdjąć plaster, bliznę oczyścić neutralnym mydłem oraz osuszyć. Plastry silikonowe na blizny należy zmieniać co 3-5 dni, kiedy utraci właściwości przylegające do skóry, jednak najlepsze efekty można uzyskać przy wymianie plastra co 24 godziny.**Producent**Podmiot odpowiedzialny:BIOVENA HEALTH SP. Z O.O.