

SIKATRIS Silikonowy plaster na zmarszczki bruzdy i blizny na dekolcie 13 cm x 14 cm 1 sztuka

Cena: 20,99 PLN



Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	BIOVENA HEALTH SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Właściwości Dlaczego plastry SIKATRIS? wygładzają zmarszczki oraz redukują bruzdy występujące na dekolcie, ujędrniają skórę na dekolcie i przywrócą jej zdrowy wygląd. Produkt najwyższej jakości, certyfikowany jako wyrób medyczny klasy I. Zastosowanie ultracienkiego silikonu pozwoli na codzienne stosowanie nie wywołujące uczucia dyskomfortu.
Sposób użycia Przed użyciem dokładnie umyć ręce. Delikatnie umyć mydłem bliznę i otaczającą skórę, spłukać ciepłą wodą. Ostrożnie osuszyć bliznę. Wyjąć plaster z opakowania. W razie konieczności, przyciąć plaster do rozmiaru blizny, zostawiając niewielki naddatek (przynajmniej 0,5 cm z każdej strony blizny). Ostrożnie usunąć folię ochronną z plastra. Delikatnie przyłożyć stroną samoprzylepną, zaczynając od brzegu blizny. Dokleić do całej powierzchni blizny. Zaleca się raz dziennie zdjąć plaster, bliznę oczyścić neutralnym mydłem oraz osuszyć. Plastry silikonowe na blizny należy zmieniać co 3-5 dni, kiedy utraci właściwości przylegające do skóry, jednak najlepsze efekty można uzyskać przy wymianie plastra co 24 godziny.
Producent Podmiot odpowiedzialny: BIOVENA HEALTH SP. Z O.O.