

SilMed Termometr elektroniczny z twardą końcówką DMT-3032, 1 szt.

Cena: 16,57 PLN



Opis słownikowy

CE	0197
Opakowanie	1 szt.
Producent	SILESIA PHARMA SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

OpisSilMed Termometr elektroniczny z twardą końcówką DMT-3032

Termometr elektroniczny przeznaczony do pomiaru temperatury ciała u dzieci i dorosłych.

Cechy:

możliwość wyboru skali temperatury °C/°F, automatyczne wyłączenie po 10 minutach bezczynności, wodoodporny (IP 27), alarm gorączki, wskaźnik niskiego poziomu baterii, rozdzielczość wyświetlacza: 0.01°C, 2 letnia gwarancja DOOR TO DOOR.

Specyfikacja techniczna:

Zakres pomiaru: 32.00°C - 42.99°C (90.00°F-109.99°F) Dokładność: ±0.10°C (±0.20°F) w zakresie pomiarowym: 35.50°C - 42.00°C (95.90°F - 107.60°F) i/lub dla pomiarów przeprowadzanych w temperaturze otoczenia 18°C - 28°C (64.40°F - 82.40°F) ±0.20°C (±0.40°F) dla temperatur spoza zakresu pomiarowego 35.50°C - 42.00°C (95.90°F - 107.60°F) i/lub pomiarów przeprowadzanych w temperaturze otoczenia niższej niż 18°C lub wyższej niż 28°C Miejsce pomiaru: jama ustna, pachy, odbyty Bateria: 1,5V DC (typu SR41, LR41 lub UCC 392) Wymiary urządzenia: 13,8 cm x 2,2 cm x 1 cm +/-5% Waga: około 12 g (+/-5%) z baterią

Sposób użycia:

Włącz termometr przyciskiem on/off. Po sygnale dźwiękowym na ekranie wyświetli się wynik ostatnio zmierzonej temperatury, a następnie wskazanie temperatury autotestu. Gotowość termometru do wykonania pomiaru sygnalizowana jest poprzez pojawienie się symbolu „Lo” wraz z migającym symbolem °C lub °F (tryb testowy).

Umieść termometr w żądanym miejscu (w ustach, odbycie lub pod pachą): a) Pomiar w ustach Umieść końcówkę pomiarową

termometru pod językiem. Prawidłowa pozycja umiejscowienia końcówki pomiarowej termometru w jamie ustnej została oznaczona symbolem .W trakcie pomiaru zamknij usta i oddychaj równomiernie przez nos.

b) Pomiar w odbycieW celu łatwiejszej aplikacji, końcówkę pomiarową termometru przed pomiarem można posmarować wazeliną i delikatnie wsunąć ją do odbytu na głębokość około 1 cm.

c) Pomiar pod pachąWytrzyj pachę do sucha. Umieść końcówkę pomiarową termometru pod pachą i mocno przyciśnij ramię do tułowia. Z medycznego punktu widzenia ta metoda zawsze zapewnia niedokładne odczyty i nie należy jej stosować, jeśli wymagane są dokładne pomiary.

Symbol °C lub °F miga podczas całego procesu pomiaru temperatury. Gdy miganie ustanie, rozlegnie się sygnał dźwiękowy trwający około 10 sekund. Jednocześnie na wyświetlaczu LCD pojawi się wynik pomiaru temperatury.W celu uzyskania poprawnego wyniku pomiaru należy zachować zalecany minimalny czas pomiaru. Pomiar powinien być kontynuowany nawet po usłyszeniu sygnału dźwiękowego. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki pomiaru temperatury, zaleca się trzymanie termometru w jamie ustnej i w odbycie przez około 2 minuty, a pod pachą przez około 5 minut bez względu na wydawany sygnał dźwiękowy. Zaleca się zachowanie co najmniej 30 sekundowej przerwy pomiędzy pomiarami.

Zawartość opakowania:

termometr, bateria 1,5V DC (typu SR41, LR41 lub UCC 392), plastikowe etui, instrukcja używania.

Ostrzeżenia:

przed użyciem przeczytaj instrukcję używania, przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci, zdezynfekuj termometr po każdym użyciu.

Dystrybutor i podmiot prowadzący reklamę:

Silesian Pharma Sp.z o.o.