

SKIN AID Plastry wodoodporne 12 sztuki



Cena: 7,28 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	12 szt.
Postać	-
Producent	PASO-TRADING SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Opis SKIN AID Plastry wodoodporne 12 sztuki

Opatrywanie drobnych ran i skaleczeń. Plastry chronią ranę przed ryzykiem infekcji OPIS WYROBU – jak z opakowania/ katalogu: Plastry z antyseptycznym opatrunkiem z dodatkiem 0,3% chlorheksydyny, o działaniu pomocniczym, zapobiega i zwalcza infekcje kontrolując mikrośrodowisko rany.

Sposób użycia 1. Oczyszczyć i osuszyć ranę. 2. Wyjmij plaster z opakowania bezpośredniego. 3. Naklej plaster na skórę, kierując opatrunek bezpośrednio na ranę. Dociśnij krawędzie, aby zapewnić idealne przyleganie. 4. W celu usunięcia plastra, chwyć za jego krawędź i pociągnij wzdłuż skóry, aż do całkowitego odklejenia. 5. Zmieniaj plaster codziennie. **Ważne ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:** • Nie stosować, jeśli opakowanie bezpośrednio plastra jest uszkodzone. • Wyrób do użytku jednorazowego – ponowne użycie jest zabronione, grozi zakażeniem. • Po użyciu traktować jako odpad medyczny – potencjalne źródło zakażenia. • Każdy poważny incydent należy zgłosić do Producenta i właściwego Organu. • W przypadku wystąpienia uczulenia lub podrażnienia skóry należy skonsultować się z lekarzem. • Trzymać poza zasięgiem dzieci. • Podsumowanie dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności klinicznej (SSCP) dostępne w EUDAMED.

Galeria

