

SNOREEZE Plastry na nos małe/średnie 10 sztuk

Cena: 26,45 PLN



Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	10 szt.
Postać	-
Producent	APC INSTYTUT SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	-

Opis produktu

Właściwości Snoreeze, plastry na nos, 10 plasterów wyrób medyczny przeciw chrapaniu z powodu zatkanego nosa w trakcie przeziębienia lub alergii. hipoalergiczne, nie zawierają lateksu 10 plasterów rozmiar: duży/mały-średni Działanie Wyrób medyczny Snoreeze w formie plasterów na nos to idealne rozwiązanie dla chrapających z powodu zatkanego nosa w trakcie przeziębienia lub alergii. Ich sprężysty wkład delikatnie unosi skrzydełka nosa, poprawiając przepływ powietrza, co powoduje znaczące zmniejszenie chrapania. Przeznaczenie Snoreeze w formie plasterów na nos są przeznaczone dla chrapających z powodu: przeziębienia, alergii, zatkanego nosa. **Sposób użycia** Przed udaniem się na spoczynek przyklej plaster na nos według poniższej instrukcji: 1. Umyj nos. 2. Osusz dokładnie nos. 3. Umieść jeden plaster Snoreeze w poprzek nosa. 4. Nałóż na skórę nosa delikatnie przyciskając z obu stron w celu uzyskania odpowiedniego stopnia przylegania. **Ważne** Przeciwwskazania i środki ostrożności Nie stosować na otarcia, poparzenia słoneczne, podrażnioną lub uszkodzoną skórę. W przypadku wystąpienia podrażnień skóry należy natychmiast przerwać stosowanie. Nie należy stosować dłużej niż 12 godzin dziennie. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem. Przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci. Opakowanie zawiera małe elementy. Tylko do użytku zewnętrznego. Uwagi Snoreeze Plastry na nos nie są przeznaczone do zapobiegania bezdechowi sennemu. Jeśli podejrzewasz go u siebie, skonsultuj się z lekarzem. Jeśli zdejmowanie plastra łączy się z dyskomfortem lub bólem, przed odklejeniem należy dobrze namoczyć plaster myjąc nos ciepłą wodą.