


ZYSKAJ ZDROWIE Spray do higieny uszu, 30 ml

Cena: 13,04 PLN

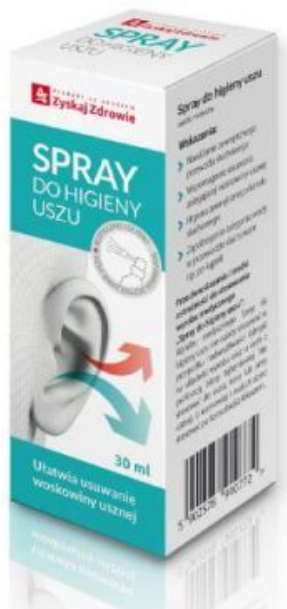

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	30 ml
Postać	-
Producent	ZYSKAJ ZDROWIE SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	-

Opis produktu

Opis ZYSKAJ ZDROWIE Spray do higieny uszu

Spray do higieny uszu Zyskaj Zdrowie to wyrób medyczny zawierający w swoim składzie **oliwę z oliwek i olejek miętowy**. Wspomaga usuwanie i rozpuszczanie złożeń **woskowiny** zalegających w uchu. Działa profilaktycznie zapobiegając jej nadmiernemu gromadzeniu się. Regularne stosowanie wyrobu pomaga w utrzymaniu prawidłowej higieny kanału słuchowego zewnętrznego.

Zastosowanie:

Preparat stosuje się wspomagająco do **oczyszczania ucha** z wydzielin powstałych w wyniku przebiegu zapalenia ucha zewnętrznego w szczególności maźwiny usznej o etiologii grzybiczej oraz bakteryjnej, objawiającej się swędzeniem ucha, zaczerwienieniem skóry przewodu słuchowego bez lub z niewielkim obrzękiem. Nawilża zewnętrzny przewód słuchowy, wspomaga usuwanie zalegającej woskowiny usznej, zapobiega zaleganiu wody w przewodzie słuchowym po kąpielach, wspomaga higienę zewnętrznego kanału słuchowego.

Sposób użycia Stosuj zgodnie z instrukcją użytkowania. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przed użyciem wstrząśnij butelką. Wprowadź aplikator w pionowej pozycji do zewnętrznego przewodu słuchowego. Naciśnij kilka razy aż pojawi się płyn, a następnie zaaplikuj odpowiednią dawkę wyrobu. Delikatnie rozsmaruj zewnętrzną część ucha. Czynność należy powtórzyć w drugim uchu. Ze względów higienicznych zalecane jest używanie jednego wyrobu przez jedną osobę. W celu zachowania właściwości wyrobu nie należy manipulować aplikatorem. Po każdorazowym użyciu należy umyć końcówkę aplikatora. Nie stosuj wyrobu po upływie terminu ważności. Wyrób należy zużyć do 6 miesięcy od pierwszego zastosowania. Nie stosować do oczu, nosa lub jamy ustnej.

Wyrób medyczny przeznaczony dla niemowląt powyżej 3. miesiąca życia, dzieci i dorosłych.

Dawkowanie:

W celu usuwania i rozpuszczania zalegających złożeń: rozpylić 1 – 2 dawki, 3 – 5 razy dziennie. Stosować do całkowitego usunięcia

małżowiny. **Prawidłowa higiena ucha** (zapobieganie tworzeniu się złożeń): rozpylić 1 – 2 dawki, 1 – 2 razy w tygodniu. **U osób uprawiających sporty wodne lub przed kąpielą:** rozpylić 1 – 2 dawki przed kontaktem z wodą.

Ważne Wyrobu medycznego nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości (alergii) na składniki produktu oraz u osób z perforacją błony bębenkowej, infekcją, bólem ucha lub założonym drenażem. W przypadku infekcji, bólu ucha lub innych niepokojących objawów preparat należy zastosować jedynie po konsultacji z lekarzem. Nie stosować do oczu, nosa lub jamy ustnej. U niemowląt i małych dzieci stosować po konsultacji z lekarzem. **Producent**

ZYSKAJ ZDROWIE SP. Z O.O.