


## SPRAY do higieny uszu 30 ml ZYSKAJ ZDROWIE

Cena: 12,50 PLN

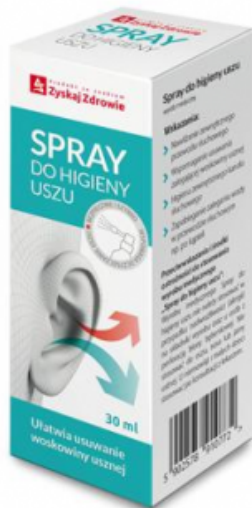

### Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	30 ml
Postać	-
Producent	ZYSKAJ ZDROWIE SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	-

### Opis produktu

**Opis**SPRAY do higieny uszu 30 ml ZYSKAJ ZDROWIE Spray do higieny uszu to wyrób medyczny zawierający w swoim składzie oliwę z oliwek i olejekmiętowy. Wspomaga usuwanie i rozpuszczanie złożeń woskowiny zalegających w uchu. Działa profilaktycznie zapobiegając jej nadmiernemu gromadzeniu się. Regularne stosowanie wyrobu pomaga w utrzymaniu prawidłowej higieny kanału słuchowego zewnętrznego. Preparat stosuje się wspomagająco do oczyszczania ucha z wydzielin powstałych w wyniku przebiegu zapalenia ucha zewnętrznego w szczególności maźkowiny usznej o etiologii grzybiczej oraz bakteryjnej, objawiającej się swędzeniem ucha, zaczerwienieniem skóry przewodu słuchowego bez lub z niewielkim obrzękiem. Nawilża zewnętrzny przewód słuchowy, wspomaga usuwanie zalegającej woskowiny usznej, zapobiega zaleganiu wody w przewodzie słuchowym po kąpieli, wspomaga higienę zewnętrznego kanału słuchowego. **Sposób użycia** W celu usuwania i rozpuszczania zalegających złożeń: rozpylić 1 – 2 dawki, 3 – 5 razy dziennie. Stosować do całkowitego usunięcia maźkowiny. Prawidłowa higiena ucha (zapobieganie tworzeniu się złożeń): rozpylić 1 – 2 dawki, 1 – 2 razy w tygodniu. U osób uprawiających sporty wodne lub przed kąpielą: rozpylić 1 – 2 dawki przed kontaktem z wodą. Przewód słuchowy zewnętrzny: przed użyciem wstrząsnąć butelką. Wprowadzić aplikator w pionowej pozycji do zewnętrznego przewodu słuchowego. Naciśnąć kilka razy aż pojawi się płyn, a następnie zaaplikować odpowiednią dawkę wyrobu. Delikatnie rozsmarować wewnętrzną część ucha. Czynność należy powtórzyć w drugim uchu. Maźłowina uszna: w przypadku zakażenia ucha zewnętrznego (maźłowina uszna) sposób stosowania należy ustalić indywidualnie z lekarzem prowadzącym. Ze względów higienicznych zalecane jest używanie jednego wyrobu przez jedną osobę. W celu zachowania właściwości wyrobu nie należy manipulować aplikatorem. Po każdorazowym użyciu należy umyć końcówkę aplikatora. **Ważne** Przeciwwskazania Wyrobu medycznego nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości (alergii) na składniki produktu oraz u osób z perforacją błony bębenkowej, infekcją, bólem ucha lub założonym drenażem. W przypadku infekcji, bólu ucha lub innych niepokojących objawów preparat należy zastosować jedynie po konsultacji z lekarzem. Nie stosować do oczu, nosa lub jamy ustnej. U niemowląt i małych dzieci stosować po konsultacji z lekarzem.